

ARIES AVICENUM 360 pończocha mocowana w pasie



Cena: 80,99 zł

Opis słownikowy

Producent	ARIES
STRONA	prawa, lewa
TYP	z czubkiem zamkniętym

Opis produktu

Medyczna pończocha mocowana w pasie ARIES AVICENUM 360 MICRO z zamkniętym czubkiem drugiej klasy kompresji wspomaga prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizuje krążenie krwi i jest niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Pończocha Avicenum 360 produkowana jest z delikatnego i przyjemnego mikrowłókna. Zdrowotna pończocha z czubkiem zamkniętym AVICENUM 360 należy do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobu gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący zaś w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie ograniczony zostaje obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Pończocha jest bezpieczna dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Pończocha jest w kolorze beżowym, posiada **zamknięty czubek** oraz jest mocowana w pasie.

Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu !! - nowe opakowanie nie zawiera znaczka SANITIZED SILVER !!

SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)
Skład: 60% PAD Nylon, 40% LYCRA
Grubość: 360 DEN
Opakowanie: 1 sztuka

UWAGA!!! PRODUKTY TYLKO NA ZAMÓWIENIE - REALIZACJA ZAMÓWIENIA TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU, BRAK MOŻLIWOŚCI WYMIANY CZY ZWROTU TOWARU. CZAS REALIZACJI OKOŁO 3-5 DNI ROBOCZYCH.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiary należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Rozmiar	Obwód nad kostką	Obwód pod kolaniem	Obwód uda (5cm poniżej kroku)
S	20-23	31-37	47-57
M	23-26	34-40	52-62
L	26-29	37-43	57-67
XL	29-32	40-46	62-72
XXL	32-35	43-49	67-77

Normal – długość 62-71

Long – długość 71-82

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończochy medycznej zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć pończochy czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie pończoch medycznych uciskowych II klasy kompresji Avicenum 360 należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

ARIES AVICENUM to wyroby przyjazne w użyciu i dające poczucie bezpieczeństwa. Spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, dzięki czemu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia. Są komfortowe i wygodne w noszeniu.

Parametry

ROZMIAR

S NORMAL (1K), S LONG (1D), M NORMAL (2K), M LONG (2D), L NORMAL (3K), L LONG (3D), XL NORMAL (4K), XL LONG (4D)

Galeria

