

## ARIES Avicenum ANTI-TROMBO pończochy przeciwzakrzepowe



Cena od: 74,99 zł

### Opis produktu

**Pończochy Aries AVICENUM ANTI-TROMBO** to pończochy przeznaczone dla osób leżących, czyli dla pacjentów przed, w trakcie i po operacji. Aries Avicenum ANTI-TROMBO zmniejszają ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach pacjentów podczas leczenia szpitalnego. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabniecy za w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. Produkt jest bardzo przyjemny w dotyku, elastyczny, miękki i idealnie przylega do ciała. Spełnia obowiązujące wymogi dla produktów będących w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Produkty z serii ANTI-TROMBO wspomagają i poprawiają krążenie krwi. Zastosowana apretura antybakteryjna i przeciwgrzybiczna Sanitized zapobiega pojawianiu się bakterii i pleśni oraz skutecznie chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. ANTI-TROMBO to alternatywa klasycznego bandażowania kończyn, przeznaczone są do użytku zarówno domowego jak i szpitalnego.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)**

**SKŁAD:** 70% PAD Nylon, 30 % elastan LYCRA

**WERSJA:** Palce zamknięte, wzmocniona pięta i palce, otwór rewizyjny

**WYKOŃCZENIE:** 2,5 cm lamówka z guzkami silikonu, które utrzymują pończochę na miejscu


**KOLOR:** Biały

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg. Swoją skutecznością i bezpieczeństwem zachowują przez okres 6 miesięcy od pierwszego użycia przestrzegajcie zasad ich pielęgnacji i przechowywania.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

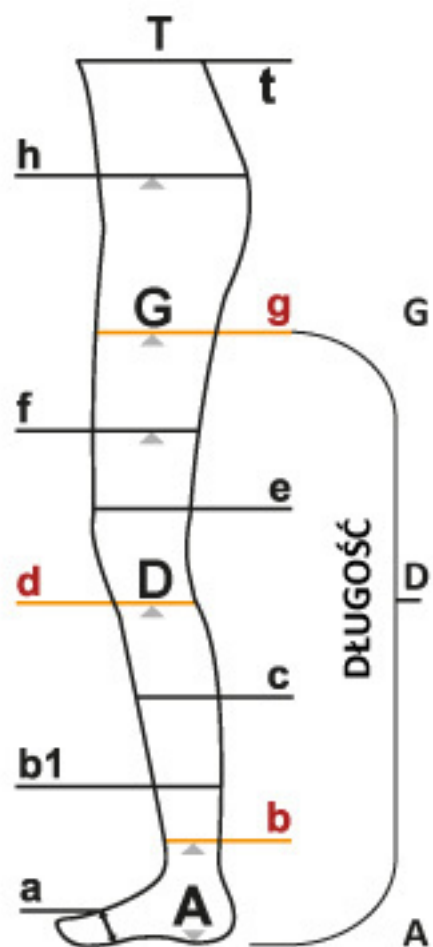

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na ścieżce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży

## PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar S

74,99 zł

Rozmiar S



Rozmiar M

74,99 zł

Rozmiar M



Rozmiar L

74,99 zł

Rozmiar L



Rozmiar XL

74,99 zł

Rozmiar XL




Rozmiar XXL

74,99 zł

Rozmiar XXL

## Galeria

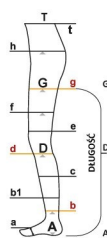

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

ROZMIAR	OBWÓD W PUNKTACH		
	b	d	g
S	17-20	28-34	41-54
M	20-23	31-37	48-61
L	23-26	34-40	55-68
XL	26-29	37-43	62-75
XXL	29-32	40-46	69-82