

ARIES Avicenum FINE 360 podkolanówki czubek otwarty bez



Cena od: 107,99 zł

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe ARIES Avicenum FINE 360 z czubkami otwartymi

drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Produkty z serii Aries Avicenum FINE 360 są cieńsze i delikatniejsze, dzięki czemu wyglądają nie przypominają wyrobu medycznego i pozwalają modnie wyglądać każdego dnia. Mimo tego, że są cieńsze to w pełni zachowują funkcję 2 klasy kompresji. Zdrowotne podkolanówki Aries Avicenum FINE 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się za w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada otwarty czubek oraz wzmocniony piętę co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Palce otwarte, wzmocniona pięta


KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

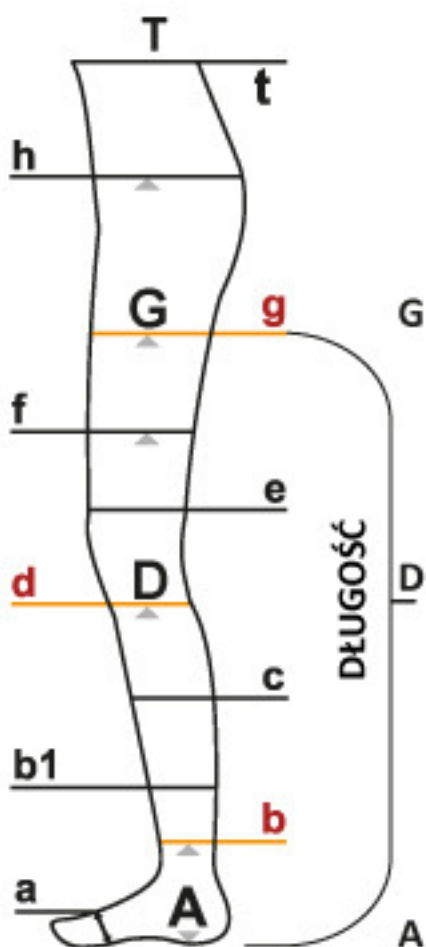

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność łylna
- pierwotne i wtórne łyłaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie łyły
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy łyły górnokochnych
- obrzęki i łyłaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy łyły górnokochnych przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii łyłaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu łyłaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa łyłaków)
- zakrzepica podczas podróży

PRZECIWSKAZANIA:

- uci??liwe s?cz?ce si? uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie ko?czyn
- krytyczne niedokrwienie ko?czyn
- zdekompensowana niewydolno?? serca
- bolesny obrz?k siniczny i bolesny obrz?k bia?y
- nadwra?liwo?? na u?yte materia?y
- zaburzenia czucia ko?czyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdj?cie na danej aukcji jest nieaktualne, poniewa? producent nie dodaje ju? dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.

Warianty produktu



Rozmiar S Normal

107,99 zł

Rozmiar S Normal



Rozmiar S Long

107,99 zł

Rozmiar S Long



Rozmiar M Normal

107,99 zł

Rozmiar M Normal



Rozmiar M Long

107,99 zł

Rozmiar M Long



Rozmiar L Normal

107,99 zł

Rozmiar L Normal



Rozmiar L Long

107,99 zł

Rozmiar L Long



Rozmiar XL Normal

107,99 zł

Rozmiar XL Normal




Rozmiar XL Long

107,99 zł

Rozmiar XL Long

Galeria

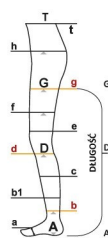

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

DŁUGOŚĆ (cm)		
RÓZMIAR	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82

OBWÓD W PUNKTACH										
RÓZMIAR	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
S	19,25	20,25	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25
M	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5
M	19,75	20,75	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75
M	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
M	20,25	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25
M	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
M	20,75	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75
L	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
L	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25
L	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5
L	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75
L	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
L	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25
L	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5
L	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75
L	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0
L	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25
L	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5
L	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75
L	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
L	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25
L	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
L	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75
L	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
L	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25
L	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
L	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75
L	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
L	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25
L	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
L	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75
L	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
L	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25
L	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
L	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75
L	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
L	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25
L	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
L	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75
L	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0
L	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25
L	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
L	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75
L	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
L	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25
L	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
L	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75
L	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
L	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25
L	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
L	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75
L	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0
L	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25
L	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5
L	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75
L	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0
L	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25
L	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5
L	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75
L	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0
L	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25
L	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5
L	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75
L	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0
L	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25
L	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5
L	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75
L	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
L	36,25	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25
L	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5
L	36,75	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	45,75
L	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
L	37,25	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25	46,25
L	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5
L	37,75	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	45,75	46,75
L	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0
L	38,25	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25	46,25	47,25
L	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5
L	38,75	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	45,75	46,75	47,75
L	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
L	39,25	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25	46,25	47,25	48,25
L	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5
L	39,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	45,75	46,75	47,75	48,75
L	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0
L	40,25	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25	46,25	47,25	48,25	49,25
L	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
L	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	45,75	46,75	47,75	48,75	49,75
L	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0
L	41,25	42,25	43,25	44,25	45,25	46,25	47,25	48,25	49,25	50,25
L	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46				

