

## ARIES Avicenum FINE 360 podkolanówki czubek zamknięty bez



Cena od: 107,99 zł

Opis produktu

### Podkolanówki uciskowe ARIES Avicenum FINE 360 z czubkami zamkniętymi

drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Produkty z serii Aries Avicenum FINE 360 są cieńsze i delikatniejsze, dzięki czemu wyglądają nie przypominają wyrobu medycznego i pozwalają modnie wyglądać każdego dnia. Mimo tego, że są cieńsze to w pełni zachowują funkcję 2 klasy kompresji. Zdrowotne podkolanówki Aries Avicenum FINE 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się za w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada zamknięty czubek oraz wzmocniony piętę co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

**KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)**

**SKŁAD:** 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

**WERSJA:** Palce zamknięte, wzmocniona pięta


**KOLOR:** Beżowy

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

## **JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?**

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

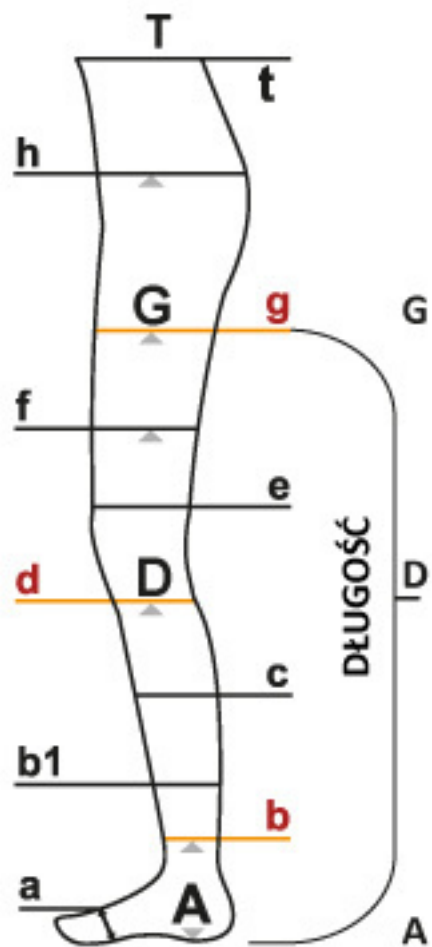

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży








## PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.**

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

## Warianty produktu

	Rozmiar S Normal Rozmiar S Normal	107,99 zł
	Rozmiar S Long Rozmiar S Long	107,99 zł
	Rozmiar M Normal Rozmiar M Normal	107,99 zł
	Rozmiar M Long Rozmiar M Long	107,99 zł
	Rozmiar L Normal Rozmiar L Normal	107,99 zł
	Rozmiar L Long Rozmiar L Long	107,99 zł
	Rozmiar XL Normal Rozmiar XL Normal	107,99 zł




Rozmiar XL Long

107,99 zł

Rozmiar XL Long

Galeria

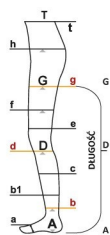

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

DŁUGOŚĆ (cm)		
ROZMIAR	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82

OBWÓD W PUNKTACH										
ROZMIAR	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	100	80
S	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	110	80
S+	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	120	80
M	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	100	85
M	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	110	85
M+	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	120	85
L	25,31	26,29	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	100	90
L	25,31	26,29	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	110	90
L+	25,31	26,29	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	120	90
XL	28,34	29,32	30,39	41,47	42,26	42,29	46,54	51,59	100	90
XL	28,34	29,32	30,39	41,47	42,26	42,29	46,54	51,59	110	90
XL+	28,34	29,32	30,39	41,47	42,26	42,29	46,54	51,59	120	90
XXL	31,37	32,35	33,42	44,50	45,29	45,32	49,57	54,62	100	100