

ARIES Avicenum FINE 360 pończochy z koronką czubek otwarty bez



Cena od: 129,95 zł

Opis produktu

Pończochy uciskowe ARIES Avicenum FINE 360 z czubkami otwartymi

drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Produkty z serii Aries Avicenum FINE 360 są cieńsze i delikatniejsze, dzięki czemu wyglądają nie przypominają wyrobu medycznego i pozwalają modnie wyglądać każdego dnia. Mimo tego, że są cieńsze to w pełni zachowują funkcję 2 klasy kompresji. Zdrowotne pończochy Aries Avicenum FINE 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się za w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada otwarty czubek oraz wzmocnione pięty co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Palce otwarte, wzmocniona pięta

WYKOŃCZENIE: Koronka


KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość w wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

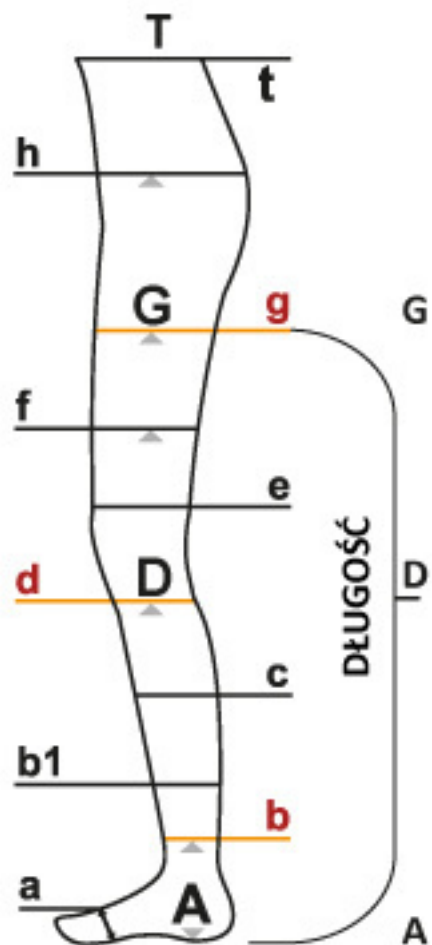

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży








PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu

	Rozmiar S Normal Rozmiar S Normal	129,95 zł
	Rozmiar S Long Rozmiar S Long	129,95 zł
	Rozmiar M Normal Rozmiar M Normal	129,95 zł
	Rozmiar M Long Rozmiar M Long	129,95 zł
	Rozmiar L Normal Rozmiar L Normal	129,95 zł
	Rozmiar L Long Rozmiar L Long	129,95 zł
	Rozmiar XL Normal Rozmiar XL Normal	129,95 zł




Rozmiar XL Long

Rozmiar XL Long

129,95 zł

Galeria

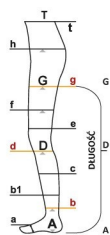

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

DŁUGOŚĆ (cm)		
ROZMIAR	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82

OBWÓD W PUNKTACH										
ROZMIAR	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	100	80
S	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	110	80
S+	19,25	20,25	21,30	32,38	33,17	33,20	37,45	42,50	110	80
M	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	100	80
M	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	110	80
M+	22,28	23,28	24,33	35,41	36,20	36,23	40,48	45,53	110	80
L	25,31	26,31	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	100	80
L	25,31	26,31	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	110	80
L+	25,31	26,31	27,36	38,44	39,23	39,26	43,51	48,56	110	80
XL	28,34	29,34	30,39	41,49	42,28	42,31	46,56	51,61	100	80
XL	28,34	29,34	30,39	41,49	42,28	42,31	46,56	51,61	110	80
XL+	28,34	29,34	30,39	41,49	42,28	42,31	46,56	51,61	110	80
XXL	28,34	29,34	30,39	41,49	42,28	42,31	46,56	51,61	120	80
XXL	28,34	29,34	30,39	41,49	42,28	42,31	46,56	51,61	130	80