

ARIES Avicenum FINE 360 rajstopy uciskowe beżowe



Cena od: 159,89 zł

Opis produktu

Rajstopy uciskowe ARIES Avicenum FINE 360 z czubkami

zamkniętymi drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastępowanym elementem terapii uciskowej. Produkty z serii Aries Avicenum FINE 360 są cieńsze i delikatniejsze, dzięki czemu wyglądają nie przypominają wyrobu medycznego i pozwalają modnie wyglądać każdego dnia. Mimo tego, że są cieńsze to w pełni zachowują funkcję 2 klasy kompresji. Zdrowotne rajstopy Aries Avicenum FINE 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się za w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada zamknięte czubki oraz wzmocnione pięty, co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Palce zamknięte, wzmocniona pięta


KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest największe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

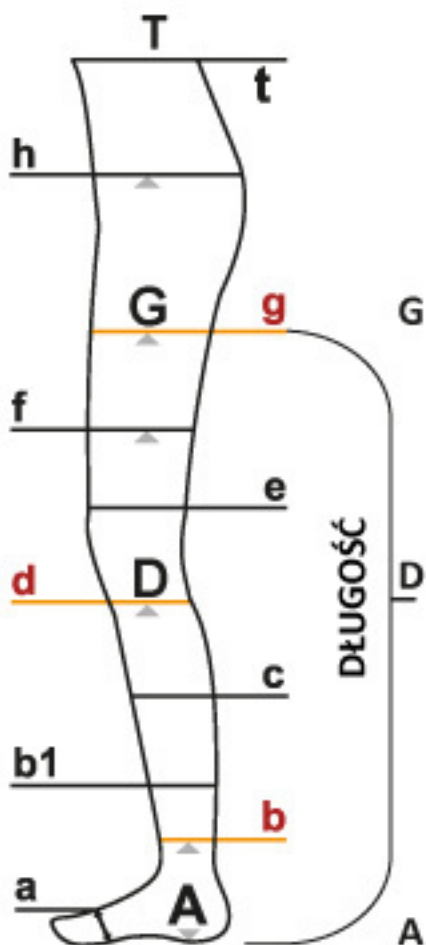

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży

PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe schyłkowe uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk śródstopia i bolesny obrzęk łąkotki
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar S Normal

159,89 zł

Rozmiar S Normal



Rozmiar S Long

159,89 zł

Rozmiar S Long



Rozmiar M Normal

159,89 zł

Rozmiar M Normal



Rozmiar M Long
 Rozmiar M Long

159,89 zł



Rozmiar L Normal
 Rozmiar L Normal

159,89 zł



Rozmiar L Long
 Rozmiar L Long

159,89 zł



Rozmiar XL Normal
 Rozmiar XL Normal


159,89 zł



Rozmiar XL Long
 Rozmiar XL Long

159,89 zł

Galeria

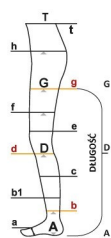

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (cm)	
	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82

ROZMIAR	OBWÓD W PUNKTACH									
	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S	21,25	22,25	25,30	31,38	33,37	35,39	37,45	41,52	100	80
S+	21,25	22,25	25,30	31,38	33,37	35,39	37,45	41,52	100	80
M	22,25	23,25	26,30	32,38	34,37	36,39	38,45	42,52	100	80
M+	22,25	23,25	26,30	32,38	34,37	36,39	38,45	42,52	100	80
L	23,25	24,25	27,30	33,38	35,37	37,39	39,45	43,52	100	80
L+	23,25	24,25	27,30	33,38	35,37	37,39	39,45	43,52	100	80
XL	24,25	25,25	28,30	34,38	36,37	38,39	40,45	44,52	100	80
XL+	24,25	25,25	28,30	34,38	36,37	38,39	40,45	44,52	100	80
2XL	25,25	26,25	29,30	35,38	37,37	39,39	41,45	45,52	100	80