

## ARIES Avicenum PHLEBO 140 Pończochy uciskowe z koronką kolor czarny



Cena od: 76,59 zł

Opis produktu

**Pończochy uciskowe ARIES Avicenum PHLEBO 140 cienkie z koronką** samonożne to kompresyjne medyczne wyroby pończosznice I klasy kompresji (CCL1). łagodzą objawy niewydolności żylnej oraz uczucia zmęczenia i napięcia w nogach, łagodzą problemy związane z początkiem niewydolności żylnej. Aby osiągnąć pożądaną efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Pończoch kompresyjnych należy używać podczas obciążenia kończyn dolnych. s? wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki zdrowotnej. Przeznaczone s? do kompresjoterapii stosowanej w chorobach naczyń żylnych i obrzęków różnego pochodzenia kończyn dolnych. Dzięki regularnemu noszeniu pończoch zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** I (18-21 mmHg)

**SKŁAD:** 69% PAD Nylon, 31% elastan LYCRA

**WERSJA:** Palce zamknięte, wzmocniona pięta

**WYKOŹCZENIE MANKIETU:** Koronka

**KOLOR:** Czarny


**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:** Normal i Long

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg. Swoją skuteczność i bezpieczeństwo zachowuj przez okres 6 miesięcy od pierwszego użycia przestrzegaj zasad ich pielęgnacji i przechowywania.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

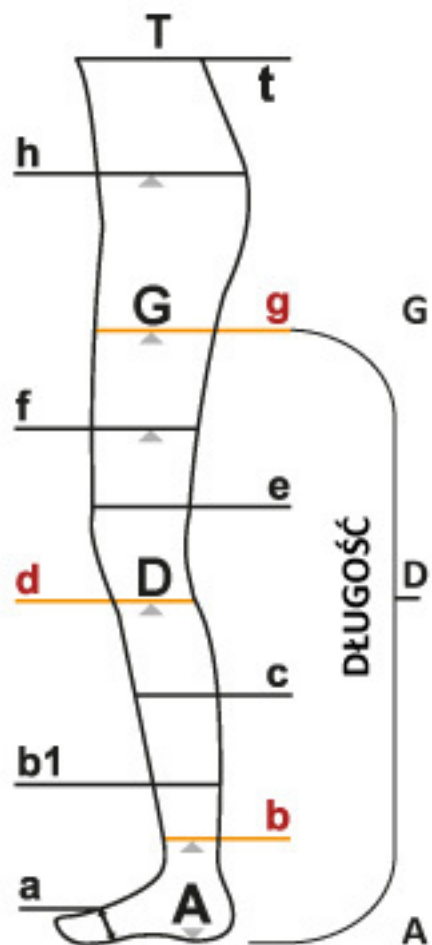

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

OBWÓD W PUNKTACH						
ROZMIAR	b	d	f	g	h	t
S	20-24	34-37	46-50	50-55	110	80
M	24-27	37-40	50-54	55-60	120	90
L	27-30	40-44	54-58	60-66	130	100

DŁUGOŚĆ (cm)		
ROZMIAR	NORMAL	LONG
<b>Podkolanówki AD</b>	34-38	38-43
<b>Pończochy AG/ Rajstopy AT</b>	62-71	71-82

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży

## PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

## TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIET?.

### Warianty produktu



Rozmiar S, długość Normal

76,59 zł

Rozmiar S, długość Normal



Rozmiar S, długość Long

76,59 zł

Rozmiar S, długość Long



Rozmiar M, długość Normal

76,59 zł

Rozmiar M, długość Normal



Rozmiar M, długość Long

76,59 zł

Rozmiar M, długość Long



Rozmiar L, długość Normal

76,59 zł

Rozmiar L, długość Normal




Rozmiar L, długość Long

76,59 zł

Rozmiar L, długość Long

## Galeria

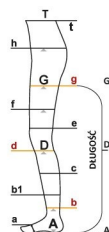

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

ROZMIAR	OBWÓD W PUNKTACH					
	b	d	f	g	h	t
S	20-24	34-37	46-50	50-55	110	80
M	24-27	37-40	50-54	55-60	120	90
L	27-30	40-44	54-58	60-66	130	100

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (cm)	
	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82