

ARIES Avicenum PHLEBO 360 COTTON pończochy z lamówką czubki otwarte bez



Cena od: 158,59 zł

Opis produktu

Pończochy uciskowe ARIES Avicenum PHLEBO 360 COTTON z czubkami otwartymi drugiej klasy kompresji z dużą zawartością bawełny (60%) są wskazane przede wszystkim dla pacjentów o wrażliwej skórze. Pomimo wysokiej zawartości bawełny produkt świetnie trzyma się na nodze. Do bawełny dodano przyjemną mikrofibrę i lycrę o podwójnym splacie. Zdrowotne pończochy Aries Avicenum PHLEBO 360 COTTON należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Produkt bezpieczny dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii.

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% Bawełna, 35% elastan Lycra, 5% PAD Nylon

WERSJA: Palce otwarte, wzmocniona pięta

WYKOŃCZENIE: Lamówka


KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość w wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

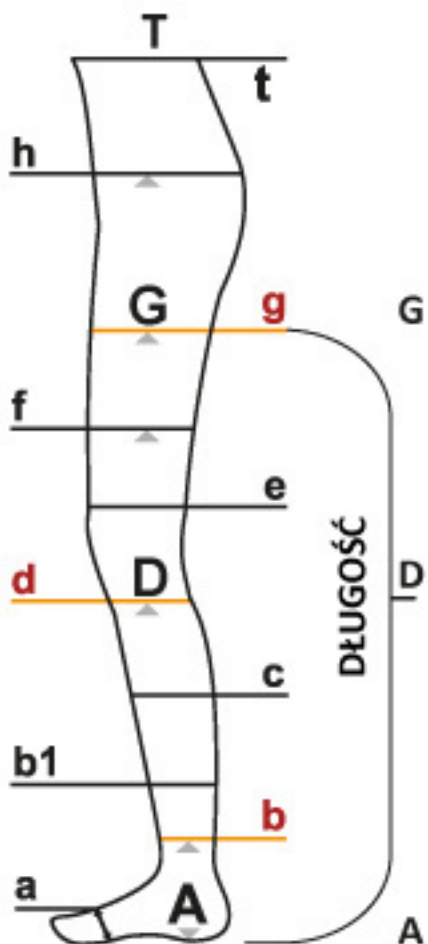

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży

PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stłżenie się uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn

- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar S Normal

158,59 zł

Rozmiar S Normal



Rozmiar S Long

158,59 zł

Rozmiar S Long



Rozmiar M Normal

158,59 zł

Rozmiar M Normal



Rozmiar M Long

158,59 zł

Rozmiar M Long



Rozmiar L Normal

158,59 zł

Rozmiar L Normal



Rozmiar L Long

158,59 zł

Rozmiar L Long



Rozmiar XL Normal

158,59 zł

Rozmiar XL Normal




Rozmiar XL Long

158,59 zł

Rozmiar XL Long

Galeria

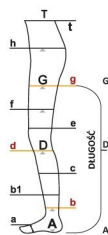

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

DŁUGOŚĆ (cm)		
RÓZMIAR	NORMAL	LONG
Podkolanówki AD	34-38	38-43
Pończochy AG/ Rajstopy AT	62-71	71-82

OBWÓD W PUNKTACH										
RÓZMIAR	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
S	19,25	20,25	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25
M	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5
M	19,75	20,75	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75
M	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
M	20,25	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25
M	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
M	20,75	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75
L	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
L	21,25	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25
L	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5
L	21,75	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75
L	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
L	22,25	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25
L	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5
L	22,75	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75
L	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0
L	23,25	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25
L	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5
L	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75
L	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
L	24,25	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25
L	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
L	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75
L	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
L	25,25	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25
L	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
L	25,75	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75
L	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
L	26,25	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25
L	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
L	26,75	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75
L	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
L	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25
L	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
L	27,75	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75
L	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
L	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25
L	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
L	28,75	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75
L	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0
L	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25
L	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
L	29,75	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75
L	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
L	30,25	31,25	32,25	33,25	34,25	35,25	36,25	37,25	38,25	39,25
L	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
L	30,75	31,75	32,75	33,75	34,75	35,75	36,75	37,75	38,75	39,75
L	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0

