

ARIES Avicenum PHLEBO 360 pończochy lamówka czubek zamknięty bez



Cena od: 129,95 zł

Opis produktu

Pończochy uciskowe ARIES Avicenum PHLEBO 360 z czubkami zamkniętymi drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Pończochy z serii 360 produkowane są z delikatnego i przyjemnego mikrowłókna. Zdrowotne pończochy Aries Avicenum PHLEBO 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żylnych. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada zamknięty czubek oraz wzmocnioną piętę co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Palce zamknięte, wzmocniona pięta

WYKOŹCZENIE: Lamówka


KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość w wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

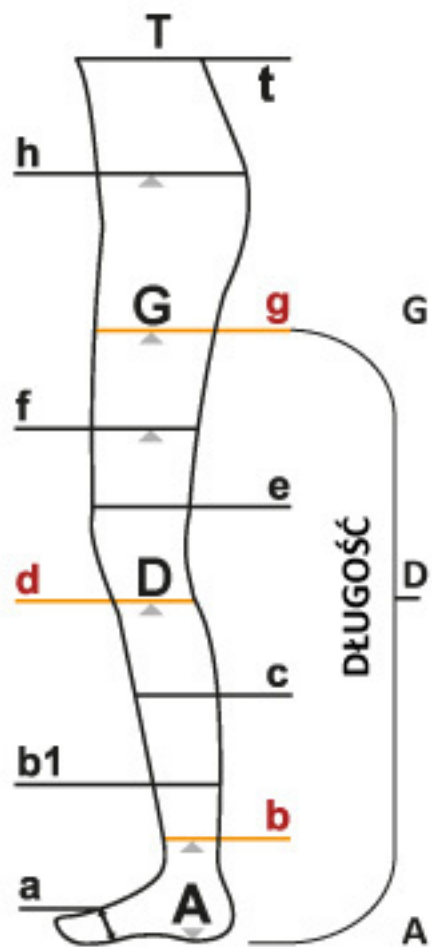

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolanem
- e obwód nad kolanem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żylaków)
- zakrzepica podczas podróży








PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu

| | | |
|--|--|-----------|
|  | Rozmiar S Normal Rozmiar S Normal | 129,95 zł |
|  | Rozmiar S Long Rozmiar S Long | 129,95 zł |
|  | Rozmiar M Normal Rozmiar M Normal | 129,95 zł |
|  | Rozmiar M Long Rozmiar M Long | 129,95 zł |
|  | Rozmiar L Normal Rozmiar L Normal | 129,95 zł |
|  | Rozmiar L Long Rozmiar L Long | 129,95 zł |
|  | Rozmiar XL Normal Rozmiar XL Normal | 129,95 zł |



Rozmiar XL Long

129,95 zł

Rozmiar XL Long



Rozmiar XXL Normal

129,95 zł

Rozmiar XXL Normal




Rozmiar XXL Long

129,95 zł

Rozmiar XXL Long

Galeria

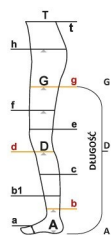

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (cm) | |
|---------------------------|--------------|-------|
| | NORMAL | LONG |
| Podkolanówki AD | 34-38 | 38-43 |
| Pończochy AG/ Rajstopy AT | 62-71 | 71-82 |

| ROZMIAR | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| S | 19,25 | 20,72 | 21,50 | 32,38 | 33,31 | 33,30 | 37,45 | 37,52 | 40,00 | 20 |
| S+ | 19,25 | 20,72 | 21,50 | 32,38 | 33,31 | 33,30 | 37,45 | 37,52 | 40,00 | 20 |
| M | 22,20 | 23,30 | 24,33 | 35,41 | 36,40 | 36,42 | 40,68 | 40,72 | 43,00 | 25 |
| M+ | 22,20 | 23,30 | 24,33 | 35,41 | 36,40 | 36,42 | 40,68 | 40,72 | 43,00 | 25 |
| L | 25,31 | 26,30 | 27,30 | 38,44 | 39,43 | 39,45 | 45,52 | 45,52 | 47,50 | 30 |
| L+ | 25,31 | 26,30 | 27,30 | 38,44 | 39,43 | 39,45 | 45,52 | 45,52 | 47,50 | 30 |
| M- | 28,34 | 29,33 | 30,33 | 41,47 | 42,46 | 42,48 | 48,55 | 48,55 | 50,50 | 35 |
| M | 28,34 | 29,33 | 30,33 | 41,47 | 42,46 | 42,48 | 48,55 | 48,55 | 50,50 | 35 |
| M+ | 28,34 | 29,33 | 30,33 | 41,47 | 42,46 | 42,48 | 48,55 | 48,55 | 50,50 | 35 |
| L- | 31,37 | 32,36 | 33,36 | 44,50 | 45,49 | 45,51 | 51,58 | 51,58 | 53,50 | 40 |
| L | 31,37 | 32,36 | 33,36 | 44,50 | 45,49 | 45,51 | 51,58 | 51,58 | 53,50 | 40 |
| L+ | 31,37 | 32,36 | 33,36 | 44,50 | 45,49 | 45,51 | 51,58 | 51,58 | 53,50 | 40 |