

## ARIES Avicenum PHLEBO 70 rajstopy profilaktyczne bordo



Cena od: 52,99 zł

### Opis produktu

**Rajstopy Aries Avicenum PHLEBO 70** wspomagają i poprawiają krążenie krwi. Działają zapobiegawczo przeciw powstawaniu żylaków i cellulitu. Zapobiegają okresowym obrzękom, np. podczas długiego stania lub siedzenia. Rajstopy profilaktyczne zalecane są przy narastającym obrzęku w czasie dnia, podczas pracy stojącej i długotrwałego siedzenia, przy wieczornym uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg oraz w przypadku występowania żylaków kończyn w rodzinie.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** profilaktyczna (10-17 mmHg)

**SKŁAD:** 76% PAD Nylon, 24% elastan LYCRA

**WERSJA:** Czubki zamknięte, wzmocnione palce

**GRUBOŚĆ:** 70 den

**KOLOR:** Bordo

## **OPAKOWANIE:** 1 para

Dodatkowym zaleceniem do stosowania są objawiające się tzw. pajęczki żyłne lub wyraźne żyły na kośćcy, ale bez wyraźnego uwypuklenia. Produkt wzbogacony apreturą Sanitized co czyni go produktem o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Rajstopy są wzmocnione na palcach co przedłuża ich żywotność, a klin pomaga lepiej dopasować rajstopy w obrębie bioder dzięki czemu są wygodniejsze w noszeniu.

## **DOBÓR ROZMIARU:**

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy dopasować wzrost oraz obwód bioder do podanych poniżej wymiarów:

Rozmiar S (wzrost 158-164 cm, obwód bioder ok 100 cm)

Rozmiar S+ (wzrost 158-164 cm, obwód bioder 116-124 cm)

Rozmiar M (wzrost 164-170 cm, obwód bioder ok 108 cm)

Rozmiar M+ (wzrost 164-170 cm, obwód bioder 116-124 cm)

Rozmiar L (wzrost 170-176 cm, obwód bioder 108-116 cm)

Rozmiar L+ (wzrost 170-176 cm, obwód bioder 116-124 cm)

Rozmiar XL (wzrost 176-182 cm, obwód bioder 108-116 cm)

Rozmiar XL+ (wzrost 176-182 cm, obwód bioder 116-124 cm)

## **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**






Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## **WSKAZANIA:**

- stan bez objawów
- profilaktyka w czasie ciąży
- profilaktyka w podróży

**Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.**

#### Warianty produktu

	Rozmiar S Rozmiar S	52,99 zł
	Rozmiar M Rozmiar M	52,99 zł
	Rozmiar L Rozmiar L	52,99 zł
	Rozmiar XL Rozmiar XL	52,99 zł
	Rozmiar M+ Rozmiar M+	52,99 zł



Rozmiar L+

52,99 zł

Rozmiar L+



Rozmiar XL+

52,99 zł

Rozmiar XL+

## Galeria

