

Majtki Chłonne Tena Pants Proskin Super M 30 sztuk

Cena: 116,99 zł



Opis słownikowy

Producent TENA

Opis produktu

TENA Pants Super Medium, majtki chłonne, 30 szt to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 7/8). TENA Pants Super Medium przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 80-110 cm w pasie. TENA Pants dzięki systemom Feel Dry i Odour Neutralizer zapewniają suchość i neutralizują nieprzyjemny zapach. TENA Pants są zakładane jak zwykła bielizna, zapewniają wysoki komfort i dyskrecję. Majtki chłonne TENA dobrze przylegają do ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem. Dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonności, również w refundacji.

WŁAŚCIWOŚCI:

TENA Pants to majtki chłonne, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Majtki chłonne TENA Pants Super nie odznaczają się pod ubraniem, zapewniając komfort i dyskrecję w trakcie chodzenia.

- błyskawiczna suchość dzięki systemowi FeelDry
- ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
- bardzo wygodne zakładanie - zakładane jak zwykła bielizna
- specjalny projekt SmartDesign dla dyskrecji i komfortu
- oddychający materiał dla ochrony skóry

WSKAZANIA:

Dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 7/8), o rozmiarze 80-110 cm w pasie.

STOSOWANIE:

Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki chłonne TENA Pants jak zwykłą bieliznę.

Po wykorzystaniu:

2. Aby zdjąć, po użyciu rozerwij majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
3. Po zdjęciu zroluj majtki chłonne i zaklej rzepem.
4. Wyrzuć zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci.

INNE DOSTĘPNE ROZMIARY:

TENA Pants Super dostępne są również w rozmiarze L oraz w wariantach o niższych poziomach chłonności: TENA Normal i TENA Plus. Aby dobrać odpowiedni produkt spójrz na tabelę rozmiarów i chłonności.

Galeria

