

Orteza kręgosłupa Lumbamed facet MEDI



Cena: 423,99 zł

Opis słownikowy

Producent MEDI

Opis produktu

Orteza kręgosłupa Lumbamed facet MEDI działa dzięki połączeniu uciskającej dzianiny, prętów stabilizujących plecy oraz zwiększającego nacisk systemu napinanych pasów. Nacisk wywierany na brzuch i wsparcie muskulatury tułowia powodują odciążenie kręgosłupa lędźwiowego oraz zmniejszenie bólu. Cztery krzyżujące się napinane pasy stanowią wraz z grzbietowymi punktami oddziaływania na miednicę i górny rejon kręgosłupa lędźwiowego, podwójny system trzech punktów.

Czym wyróżnia się orteza kręgosłupa Lumbamed facet MEDI?

- Dzięki indywidualnej regulacji nacisku składający się z pasów system trzech punktów wzmacnia efekt zmniejszający lordozę.
- Zasadniczo ortezę można nosić przez cały dzień.
- Specjalny wykrój w rejonie pachwin (Comfort Zone) znacząco przyczynia się do zachowania właściwego i komfortowego umiejscowienia ortezy.
- Długość stosowania zależy od indywidualnych potrzeb.

Wskazania

- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Wysunięcie i wypadnięcie krążka międzykręgowego
- Nasilony ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa / rwa kulszowa
- Lumbago
- Lumbago z zajęciem stawu krzyżowobiodrowego
- Przewlekły ból w rejonie krzyżowolędźwiowym
- Spondyloza bez kręgozmyku
- Spondylolisteza
- Zaburzenia równowagi mięśniowej
- Niestabilność segmentowa
- Zwężenie kanału kręgowego na odcinku lędźwiowym

Przeciwwskazania

Dotychczas nie są znane żadne działania niepożądane wywierane na cały organizm. W przypadku zbyt ściśle przylegających sprzętów, np. ortez, w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić miejscowe objawy ucisku lub zwężenia naczyń krwionośnych lub nerwów.

Z tego względu w następujących sytuacjach przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym:

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry w obszarze zastosowania, przede wszystkim z objawami zapalenia (nadmierne rozgrzanie, obrzęk lub zaczerwienienie).
- Wrażliwość i zaburzenia perfuzji nóg lub stóp (na przykład w przypadku cukrzycy).
- Zastosowanie razem z innymi produktami może być wskazane, należy jednak skonsultować się z lekarzem.

Tabela rozmiarów

Rozmiar I i VI na zamówienie - czas oczekiwania ok 10 dni roboczych.

Skład materiału Poliamid, poliester, elastan
Instrukcja prania

Jakość i standard

Parametry

ROZMIAR	I, II, III, IV, V, VI
---------	-----------------------

Galeria

