

# PANI TERESA CLASSIC Rajstopy przeciwżylakowe 2 kl.



Cena: 123,99 zł

## Opis słownikowy

Producent	PANI TERESA
TYP	z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym

## Opis produktu

**Medyczne rajstopy PANI TERESA CLASSIC** 2 klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący zaś w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie ograniczony zostaje obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żylaków. Są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii.

Rajstopy występują w wersji z czubkiem zamkniętym lub otwartym.

### SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)

Skład: Poliamid 79% elastan 21%

Opakowanie: 1 para

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Krótkie – długość 60-70

Długie – długość 71-83

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie rajstop medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz

pilnować, by nie zahaczyć rajstóp czymś ostrym.

#### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

#### OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie rajstóp medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

## Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	JASNY BEŻOWY, BEŻOWY, CIEMNY BEŻOWY, GRAFITOWY, CZARNY
ROZMIAR	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

## Galeria

