

PANI TERESA gorset stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy 26/3 PT 0237 beżowy

Cena od: 121,97 zł



Opis produktu

Gorset stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy 26/3 PT 0237 to produkt ortopedyczny. Został stworzony by stabilizować odcinek lędźwiowo-krzyżowy po operacjach oraz wzmacniać mięśnie, poprawiać ukrwienie i utrzymanie temperatury. Gorset jest wielokrotnego użytku, nie ogranicza ruchów a przy tym świetnie wzmacnia, stabilizuje i odciąża kręgosłup. Gorset ma 26 cm wysokości i 3 taśmy dociskające z możliwością regulacji. Produkt został stworzony by zmniejszyć ryzyko powikłań pourazowych, wspomagać rehabilitację i umożliwić szybszy powrót do zdrowia.

SZCZEGÓŁY:

SKŁAD: 62% poliamid, 20% elastan, 18% polipropylen

KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie gorsetu należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, żeby używać go przez całe dobowo. Nie należy stosować gorsetu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmocnioną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia

ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód brzucha w najszerszym miejscu a następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

Rozmiar XS (71-80 cm)

Rozmiar S (81-90 cm)

Rozmiar M (91-100 cm)

Rozmiar L (101-110 cm)

Rozmiar XL (111-120 cm)

Rozmiar XXL (121-130 cm)

Rozmiar XXXL (131-140)

SPOSÓB ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI:

Odpiąć rzepy, gorset założyć obejmując odcinek krzyżowo-lędźwiowy tak, aby zapisać na rzepek przypadało z przodu. Gorset zapisać na rzepy, a następnie zapisać taśmy dociskające, regulując indywidualne dopasowanie. Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może spowodować to rozdarcie materiału. Jeżeli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić gorset w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapisać. Przed praniem należy wyjąć stalki z gorsetu oraz zapisać rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Wyrób prać ręcznie w wodzie o temp 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować i nie prasować.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:

- zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
- dyskopatia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- kręgoszyk niewielkiego stopnia
- doleczenie po zabiegach ortopedycznych
- zżamanie wyrostków kolczastych i poprzecznych
- doleczenie po zabiegach ortopedycznych

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.







Warianty produktu



Rozmiar XS

121,97 zł

Rozmiar XS

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
|  | Rozmiar S Rozmiar S | 121,97 zł |
|  | Rozmiar M Rozmiar M | 121,97 zł |
|  | Rozmiar L Rozmiar L | 121,97 zł |
|  | Rozmiar XL Rozmiar XL | 121,97 zł |
|  | Rozmiar XXL Rozmiar XXL | 121,97 zł |
|  | Rozmiar XXXL Rozmiar XXXL | 121,97 zł |

Galeria

