

PANI TERESA jednostronny pas pachwinowy PT 0107

Cena od: 60,25 zł



Opis produktu

Jednostronny pas pachwinowy PANI TERESA PT 0107 to produkt ortopedyczny. Pas jest przyjemny w dotyku, miękki i elastyczny. Pas doskonale przylega do ciała nie krępuje swobody ruchów, nie uciska nadmiernie i nie ogranicza krążenia krwi. Dzięki zastosowanej tkaninie dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną. Pas jest wskazany dla osób z niewielkimi przepuklinami lub pooperacyjnie przy zapobieganiu nawrotom.

SZCZEGÓŁY:

SKŁAD: 39% elastyl, 29% poliamid, 19% poliester, 8% lateks, 5% elastan

KOLOR: Cielisty

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie pasa należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać go przez całe dobowe. Nie należy stosować pasa na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód bioder a następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

Rozmiar S 85-95 cm

Rozmiar M 96-105 cm

Rozmiar L 106-115 cm

Rozmiar XL 116-125 cm

Rozmiar XXL 126-135 cm

Rozmiar XXXL 135- 145 cm

SPOSÓB ZAKŁADANIA I PRANIA:

Odpinąć rzepy. Taśmę gumową założyć na wysokości kości biodrowych. Do taśmy gumowej przypiąć taśmę kroczną - najpierw z przodu, dociskając odpowiednio odprowadzona przepuklina pachwinowa, a następnie prowadzić wzdłuż wewnętrznej części uda, z tyłu. Regulacja taśmy gumowej i taśm kroczynek umożliwia indywidualne dopasowanie. Prąć w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy wyrobu prasować ani chlorować.

WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE:

- u przypadku przepuklin pachwinowych prawostronnych lub lewostronnych
- jako zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- doskonale podtrzymuje przepukliny pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- pas przeznaczony jest dla kobiet i dla mężczyzn

PRZECIWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwięzionej, ponieważ pelota może stworzyć niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita i opóźniać konieczność pilnego leczenia operacyjnego

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar S

60,25 zł

Rozmiar S



Rozmiar M
Rozmiar M

60,25 zł



Rozmiar L
Rozmiar L

60,25 zł



Rozmiar XL
Rozmiar XL

60,25 zł



Rozmiar XXL
Rozmiar XXL

60,25 zł



Rozmiar XXXL
Rozmiar XXXL

60,25 zł

Galeria

