

PANI TERESA jednostronny pas pachwinowy z pelotą PT 0109 strona lewa

Cena od: 81,79 zł



Opis produktu

Jednostronny pas pachwinowy z pelotą PANI TERESA PT 0109 to produkt ortopedyczny. Pas jest przyjemny w dotyku, miękki i elastyczny. Pas doskonale przylega do ciała nie krępuje swobody ruchów, nie uciska nadmiernie i nie ogranicza krążenia krwi. Dzięki zastosowanej tkaninie dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną. Produkt jest idealny przy wspomaganiu procesu leczenia i rehabilitacji przy braku możliwości operacji niewielkiej przepukliny pachwinowej oraz profilaktycznie przeciw nawrotom w przypadku słabego aparatu mięśniowego. Posiada wygodne zapinanie i jest przygodny dla skóry.

SZCZEGÓŁY:

SKŁAD: 35% elastil, 28% poliamid, 19% poliester, 8% lateks, 5% elastan, 5% polietylen

KOLOR: Cielisty

STRONA: Lewa

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie pasa należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać go przez cały dzień. Nie należy stosować pasa na rany, chorobowo zmienioną lub

uszkodzon? skór?. Brak codziennej higieny osobistej lub niew?a?ciwa konserwacja wyrobu mog? spowodowa? otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych zwi?zanych ze wzmo?on? potliwo?ci? i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wyst?pienia ostrego bólu lub podra?nienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób nale?y natychmiast zdj?? i skonsultowa? si? z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawid?owego doboru rozmiaru nale?y zmierzy? obwód na wysoko?ci ko?ci biodrowych a nast?pnie wybra? rozmiar odpowiadaj?cy zakresowi poni?ej:

Rozmiar S obwód pasa 70-80 cm

Rozmiar M obwód pasa 81-90 cm

Rozmiar L obwód pasa 91-102 cm

Rozmiar XL obwód pasa 103-115 cm

Rozmiar XXL obwód pasa 116-130 cm

SPOSÓB ZAK?ADANIA I PRANIA:

Odpi?? rzepy. Ta?m? g?ówn? zapi?? na wysoko?ci ko?ci biodrowych. Do ta?my g?ównej przypi?? ta?m? kroczn? - najpierw z przodu, dociskaj?c odpowiednio odprowadzona przepuklin? pachwinow?, a nast?pnie prowadz?c wzd?u? wewn?trznej cz??ci uda, z ty?u. Regulacja ta?my g?ównej i ta?m kroczych umo?liwia indywidualne dopasowanie. Pra? w wodzie o temp. 40oC przy u?yciu delikatnych ?rodków pior?cych. Nie dopuszcza? do silnego zabrudzenia. Nie nale?y wyrobu prasowa? ani chlorowa?.

WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE:

-u chorych z przepuklin? prost? lub sko?n?

-po operacji w przypadku s?abego lub wiotkiego aparatu mi??niowo-powi?ziowego nie dopuszcza do przemieszczania si? trzewi na zewn?trz pier?cienia kana?u pachwinowego

-wskazane dla pacjentów, u których istniej? przeciwwskazania do leczenia operacyjnego

-pas przeznaczony jest dla kobiet i dla m??czyzn

PRZECIWSKAZANIA:

-nie stosowa? w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwi??ni?tej, poniewa? pelota mo?e stwarza? niebezpiecze?stwo uszkodzenia ?ciany jelita i opó?nia? konieczno?? pilnego leczenia operacyjnego

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.

Warianty produktu



Rozmiar S
Rozmiar S

81,79 zł



Rozmiar M
Rozmiar M

81,79 zł



Rozmiar L
Rozmiar L

81,79 zł



Rozmiar XL
Rozmiar XL

81,79 zł



Rozmiar XXL
Rozmiar XXL

81,79 zł

Galeria

