

# PANI TERESA orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa 32/4 PT 0238 beżowy

Cena od: 159,20 zł



## Opis produktu

**Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa 32/4 PT 0238** to produkt ortopedyczny. Została stworzona by stabilizować odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy po operacjach oraz wzmacnia mięśnie, poprawia ukrwienie i utrzymanie temperatury. Orteza jest wielokrotnego użytku, nie ogranicza ruchów a przy tym świetnie wzmacnia, stabilizuje i odciąża kręgosłup. Orteza ma 32 cm wysokości i 4 taśmy dociskające z możliwością regulacji. Produkt został stworzony by zmniejszyć ryzyko powikłań pourazowych, wspomaga rehabilitację i umożliwia szybszy powrót do zdrowia.

### SZCZEGÓŁY:

**SKŁAD:** 62% poliamid, 20% elastan, 18% polipropylen

**KOLOR:** Beżowy

**OPAKOWANIE:** 1 sztuka

Stosowanie ortezy należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać go przez całe dobowe. Nie należy stosować ortezy na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych

związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód brzucha w najszerszym miejscu a następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

Rozmiar XS (71-80 cm)

**Rozmiar S (81-90 cm)**

Rozmiar M (91-100 cm)

Rozmiar L (101-110 cm)

Rozmiar XL (111-120 cm)

Rozmiar XXL (121-130 cm)

Rozmiar XXXL (131-140)

### SPOSÓB ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI:

Odpinąć rzepy, gorset założyć obejmując odcinek krzyżowo-lędźwiowy tak, aby zapiąć na rzep przypadającą z przodu. Gorset zapiąć na rzepy, a następnie zapiąć taśmy dociskające, regulując indywidualne dopasowanie. Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może spowodować to rozdarcie materiału. Jeżeli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić gorset w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapiąć. Przed praniem należy wyjąć stalki z gorsetu oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Wyrób prać ręcznie w wodzie o temp 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować i nie prasować.

### WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:

- zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
- dyskopatia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- kręgoszyk niewielkiego stopnia
- doleczanie po zabiegach ortopedycznych
- złamanie wyrostków kolczastych i poprzecznych
- doleczanie po zabiegach ortopedycznych

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar XS

159,20 zł

Rozmiar XS



Rozmiar S

Rozmiar S

159,20 zł



Rozmiar M

Rozmiar M

159,20 zł



Rozmiar L

Rozmiar L

159,20 zł



Rozmiar XL

Rozmiar XL

159,20 zł



Rozmiar XXL

Rozmiar XXL

159,20 zł



Rozmiar XXXL

Rozmiar XXXL

159,20 zł

## Galeria

---

