

## PANI TERESA ortopedyczny kołnierz szyjny typu Florida z usztywnieniem PT 0209B 12 cm



Cena od: 39,99 zł

### Opis produktu

### Ortopedyczny kołnierz szyjny typu Florida z usztywnieniem PT 0209B

to produkt ortopedyczny, wielokrotnego użyciu. Nie ogranicza ruchów a przy tym świetnie stabilizuje, wzmacnia i odciąża. Idealny przy wspomaganiu procesu regeneracji, leczenia oraz rehabilitacji.

#### SZCZEGÓŁY:

**SKŁAD:** 28% poliamid, 24% poliuretan, 24% elastan, 22% polietylen, 2% klej

"Sabaspray 2005"

**KOLOR:** Beżowy

**WYSOKOŚĆ:** 12 cm

**OPAKOWANIE:** 1 sztuka

Stosowanie ortozy należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, żeby używać jej przez cały dobę. Nie należy stosować ortozy na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmocnioną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia

ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód szyi a następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

Rozmiar S (<38 cm)

Rozmiar M (38-43 cm)

Rozmiar L (44-48 cm)

Rozmiar XL (49-53 cm)

### SPOSÓB ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI:




Odpiąć rzepy, założyć kołnierzyk czysty i włożyć pod broda i zapiąć z tyłu szyi. Wyrób prać ręcznie w wodzie o temp 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować i nie prasować.

### WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:

- korekcyjnie w celu zwiększenia zwężonych przestrzeni międzykręgowych oraz odbudowy zniesionej lordozy szyjnej
- korekcyjnie w celu ustawienia głowy w osi kręgosłupa - kręczy szyi
- w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa - spondyloartroza
- w stanach pourazowych - whiplash
- w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego - przepuklina jądra miazdystego

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

#### Warianty produktu

	Rozmiar S Rozmiar S	39,99 zł
	Rozmiar M Rozmiar M	39,99 zł
	Rozmiar L Rozmiar L	39,99 zł



Rozmiar XL

Rozmiar XL

39,99 zł

## Galeria

