

PANI TERESA pas brzuszny poporodowy 24 PT 0104 beżowy



Cena od: 55,68 zł

Opis produktu

Poporodowy pas brzuszny PANI TERESA PT 0104 o szerokości 24 cm należy do grupy produktów ortopedycznych obejmujących wyroby medyczne, prozdrowotne i profilaktyczne. Jest przyjemnym, miłym i elastycznym w dotyku wyrobem. Pas idealnie przylega do kobiecego ciała nie krępuje swobody ruchów, nie uciska nadmiernie i nie ogranicza krążenia krwi. Jego struktura zapewnia dobrą przepuszczalność powietrza i pary wodnej. Produkt świetnie wspomaga regenerację rozciągniętej skóry po ciąży, zarówno po ciąży cesarskiej jak i po porodzie siłami natury. Użyty po ciąży cesarskiej dodatkowo ogranicza wystąpienie przepukliny pooperacyjnej, zmniejsza ryzyko wystąpienia kresy białej oraz łagodzi ból po ciąży. Wykonany jest z przewiewnych materiałów.

SZCZEGÓŁY:

WYSOKOŚĆ: 24 cm

SKŁAD: 46% poliamid, 18% polipropylen, 18% lateks, 9% bawełna, 9% poliester

KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie pasa należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać go przez całe dobowe. Nie należy stosować pasa na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja

wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód brzucha w najszerszym miejscu a następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

Rozmiar XS (71-79 cm)

Rozmiar S (80-90 cm)

Rozmiar M (91-100 cm)

Rozmiar L (101-110 cm)

Rozmiar XL (111-120 cm)

Rozmiar XXL (121-140 cm)

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii. Przed praniem należy zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Produkt należy prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu. Nie należy produktu prasować ani chlorować.

WSKAZANIA:

- po porodach fizjologicznych - wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne
- po porodach operacyjnych (cięcie cesarskie) - zabezpiecza przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa, łagodzi ból rany pooperacyjnej
- chcesz szybszego powrotu do sylwetki sprzed ciąży - regularnie stosowany pas i wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń gimnastycznych przyspiesza odzyskanie dawnej formy

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar XS

Rozmiar XS

55,68 zł



Rozmiar S

Rozmiar S

55,68 zł



Rozmiar M

Rozmiar M

55,68 zł



Rozmiar L

Rozmiar L

55,68 zł



Rozmiar XL

Rozmiar XL

55,68 zł



Rozmiar XXL

Rozmiar XXL

55,68 zł

Galeria

