

PANI TERESA pas brzuszny stomijny 24 PT 0105 beżowy



Cena od: 86,19 zł

Opis produktu

Stomijny pas brzuszny PANI TERESA PT 0105 o szerokości 24

cm należy do grupy produktów ortopedycznych obejmujących wyroby medyczne, prozdrowotne i profilaktyczne. Jest to pas wielokrotnego użytku. Zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej w okolicy przetoki dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu. Posiada możliwość osłony worka stomijnego i można go stosować w przypadku różnego umiejscowienia przetoki. Pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego. Wykonany jest z miękkiej tkaniny.

SZCZEGÓŁY:

WYSOKOŚĆ: 24 cm

SKŁAD: 39% poliester, 23% poliamid, 22% elastan, 8% bawełna, 8% lycra

KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie pasa należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać go przez całe dobowe. Nie należy stosować pasa na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy

natychmiast zdjęj i skonsultowa? si? z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawid?owego doboru rozmiaru nale?y zmierz? obwód brzucha w najszerszym miejscu a nast?pnie wybra? rozmiar odpowiadaj?cy zakresowi poni?ej:

Rozmiar XS (71-80 cm)

Rozmiar S (81-90 cm)

Rozmiar M (91-101 cm)

Rozmiar L (102-112 cm)

Rozmiar XL (113-124 cm)

Rozmiar XXL (125-137 cm)

Rozmiar XXXL (138-150cm)

SPOSÓB ZAK?ADANIA:

Odpi?? rzepy nale??c na plecach za??o?? pas obejmuj?c brzuch i odcinek krzy?owo-l?d?wiowy tak aby otwór na worek stomijny znajdowa? si? w miejscu, w którym znajduje si? stomia. Nast?pnie zapi?? rzepy i wyj?? worek stomijny przez otwór w pasie, na koniec zabezpieczy? worek materia?em os?nianaj?cym. Przed praniem nale?y zapi?? rzepy w celu unikni?cia zahaczenia wyrobu. Produkt nale?y pra? r?cznie w temperaturze 40oC przy u?yciu delikatnych ?rodków pior?cych. Nie dopuszcza? do silnego zabrudzenia produktu. Nie nale?y produktu prasowa? ani chlorowa?.

WSKAZANIA:

-po operacjach jamy brzusznej

-dla osób z przetok? jelita wytworzon? na brzuchu (zw?aszcza w okresie pooperacyjnym) -

zmniejszaj?c ryzyko wyst?pienia przepukliny w okolicy przetoki

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.

Warianty produktu



Rozmiar XS

86,19 zł

Rozmiar XS



Rozmiar S

86,19 zł

Rozmiar S



Rozmiar M
Rozmiar M

86,19 zł



Rozmiar L
Rozmiar L

86,19 zł



Rozmiar XL
Rozmiar XL

86,19 zł



Rozmiar XXL
Rozmiar XXL

86,19 zł



Rozmiar XXXL
Rozmiar XXXL

86,19 zł

Galeria

