

PANI TERESA slipy przepuklinowo-suspensoryjne męskie PT 0111

Cena od: 110,55 zł



Opis produktu

Slipy przepuklinowo-suspensoryjne męskie PANI TERESA PT 0111 to produkt ortopedyczny. Slipy są przyjemne w dotyku, miękkie i elastyczne. Slipy doskonale przylegają do ciała nie krępując swobody ruchów, nie uciskają nadmiernie i nie ograniczają krążenia krwi. Dzięki zastosowanej tkaninie dobrze przepuszczają powietrze i parę wodną. Posiadają specjalną wzmocnioną konstrukcję i posiadają specjalne pętyki zabezpieczające przepuklinę.

SZCZEGÓŁY:

SKŁAD: 88% bawełna, 5% elastomer, 5% polietylen, 2% włókno

KOLOR: Cielisty

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie slipów należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać ich przez całe dobowe. Nie należy stosować slipów na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy

natychmiast zdjęj i skonsultowa si z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidowego doboru rozmiaru naley zmierzy obwód pasa oraz obwód bioder a nastpnie wybra rozmiar odpowiadajcy zakresowi poniiej:

Rozmiar XS obwód pasa <70 cm, obwód bioder <85 cm

Rozmiar S obwód pasa 70-80 cm, obwód bioder 85-95 cm

Rozmiar M obwód pasa 81-90 cm, obwód bioder 96-105 cm

Rozmiar L obwód pasa 91-100 cm, obwód bioder 106-115 cm

Rozmiar XL obwód pasa 101-115 cm, obwód bioder 116-125 cm

Rozmiar XXL obwód pasa 116-130 cm, obwód bioder 126-135 cm

SPOSÓB ZAKADANIA I PRANIA:

Slipy zaoy tak, aby peloty zabezpieczały przepuklin. Przed praniem wyj peloty oraz zapi haftki w celu unikniicia zahaczenia wyrobu. Pra w wodzie o temp. 40oC przy uyciu delikatnych rodków piorcych. Nie dopuszcza do silnego zabrudzenia. Nie naley wyrobu prasowa ani chlorowa.

WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozleglych przepuklin pachwinowych lub udowych
- w przebiegu ostrego zapalenia jder lub najdrza
- w przypadku obrzków jder lub najdrza
- po operacjach lub po nakuciu wodniaka jdra
- w celu zapobiegania przepuklinom w przypadku bardzo szerokich kanaów pachwinowych
- wskazane dla pacjentów, u których istniej przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- agodzi bóle brzucha promieniujce do pachwiny

PRZECIWSKAZANIA:

-nie stosowa w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwi?ni?tej, poniewa pelota moe stwarza niebezpieczestwo uszkodzenia ciany jelita i opónia konieczno pilnego leczenia operacyjnego

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar XS

Rozmiar XS

110,55 zł



Rozmiar S
Rozmiar S

110,55 zł



Rozmiar M
Rozmiar M

110,55 zł



Rozmiar L
Rozmiar L

110,55 zł



Rozmiar XL
Rozmiar XL

110,55 zł



Rozmiar XXL
Rozmiar XXL

110,55 zł

Galeria

