

# PANI TERESA stabilizator stawu skokowego z taśmą PT0320

Cena od: 71,59 zł



## Opis produktu

**Stabilizator stawu skokowego z taśmą PT0320** to produkt ortopedyczny, wzmacniający i stabilizujący staw. Został stworzony by chronić przed urazami, zapewnia bezpieczeństwo i komfort nawet przy wzmożonym wysiłku fizycznym. Stabilizator można używać w obuwiu.

### SZCZEGÓŁY:

**SKŁAD:** 90% neopren, 10% poliamid

**KOLOR:** Czarny

**OPAKOWANIE:** 1 sztuka

Stosowanie stabilizatora należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, żeby używać go przez całe dobowe. Nie należy stosować stabilizatora na rany, chorobowo zmienione lub uszkodzone skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy zmierzyć obwód nogi nad kostką a

następnie wybrać rozmiar odpowiadający zakresowi poniżej:

**Rozmiar S (19-22 cm)**

Rozmiar M (23-25 cm)

Rozmiar L (26-28 cm)

Rozmiar XL (29-31 cm)

Rozmiar XXL (32-34 cm)

### **SPOSÓB ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI:**




Odpiąć rzepy, stabilizator nałożyć na wysokość stawu skokowego, umieszczać piętę w otworze, zapiąć na rzepy. Następnie nałożyć na staw skokowy taśmę wzmacniającą, krzyżując ją na przegubie stopy, zapiąć na rzepy. Przed praniem należy zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować ani chlorować.

### **WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:**

- zmniejsza ryzyko powstawania kontuzji stawu, np. podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku
- zabezpiecza przed ponownymi urazami stawu
- przyspiesza leczenie kontuzji
- złagodzi ból
- zmniejsza obrzęk
- nie ogranicza ruchów

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

#### Warianty produktu

	Rozmiar S Rozmiar S	71,59 zł
	Rozmiar M Rozmiar M	71,59 zł
	Rozmiar L Rozmiar L	71,59 zł



Rozmiar XL

71,59 zł

Rozmiar XL



Rozmiar XXL

71,59 zł

Rozmiar XXL

## Galeria

