

# PANI TERESA wysoka orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa PT 0224

Cena od: 255,99 zł



## Opis produktu

**Wysoka orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa PT 0224** to produkt ortopedyczny, wielokrotnego użytku. Nie ogranicza ruchów a przy tym świetnie stabilizuje, wzmacnia i odciąża. Produkt został stworzony by zmniejszyć ryzyko powikłań pourazowych, wspomaga rehabilitację i umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Orteza zapinana jest na rzepy, stabilizuje odcinek piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa wymuszając przyjęcie prawidłowej postawy ciała.

### SZCZEGÓŁY:

**SKŁAD:** 35% elastan, 30% poliamid, 20% bawełna, 10% latex, 5% poliuretan

**KOLOR:** Biały

**OPAKOWANIE:** 1 sztuka

Stosowanie ortezy należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać jej przez całe dobowe. Nie należy stosować ortezy na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmocnioną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy

natychmiast zdjęj i skonsultowa si z lekarzem.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidowego doboru rozmiaru naley zmierz obwód brzucha w najszerszym miejscu a nastnie wybra rozmiar odpowiadajcy zakresowi poniżej:

**Rozmiar S (81-90 cm)**

Rozmiar M (91-100 cm)

Rozmiar L (101-110 cm)

Rozmiar XL (111-120 cm)

Rozmiar XXL (121-130 cm)

## SPOSÓB ZAKADANIA I PIELGNACJI:

Odpi rzepey, zaoy ortez, obejmujc krgosup tak, aby zapiecie na rzep przypadao z przodu. Zapi rzepey z przodu wyrobu. Zapi górne taomy docigajce znajdujce si po bokach wyrobu. Taomy górne naoy na ramiona, przeoy pod pachami, skrzyowa z tyu na plecach i zapi z przodu na rzepey. Przed praniem naley zapi rzepey w celu unikniacia zahaczenia wyrobu. Wyrób pra rcznie w wodzie o temp 40oC przy uyciu delikatnych rodków piorcych. Nie dopuszcza do silnego zabrudzenia. Nie chlorowa i nie prasowa.

## WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjnie - wertebroplastyka
- pourazowo - z z amania krków w osteoporozie
- zmiany degeneracyjne krka mi dzykrkowego
- dolegliwo ci bólowe z powodu utrwalonych i zniesionych anatomicznie krzywizn krgosupa
- procesy zapalne w obrbie stawów krgosupa
- wady wrodzone krgosupa

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ UYWANIA LUB ETYKIET.**

Warianty produktu



Rozmiar S

255,99 zł

Rozmiar S



Rozmiar M

255,99 zł

Rozmiar M



Rozmiar L

255,99 zł

Rozmiar L



Rozmiar XL

255,99 zł

Rozmiar XL



Rozmiar XXL

255,99 zł

Rozmiar XXL

## Galeria

