

## Pieluchomajtki na rzepy SUPER SENI PLUS XS 10 szt.

Cena: 24,40 zł



### Opis słownikowy

Producent      Seni

### Opis produktu

**Super Seni Plus** to oddychające **pieluchomajtki** "nocne" przeznaczone dla osób aktywnych jak i dla tych o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości. Gwarantują wygodę i duży komfort użytkownika.

**Super Seni Plus** to klasyczne, oddychające **pieluchomajtki zapinane na rzepy** przeznaczone dla osób aktywnych oraz dla tych o ograniczonej mobilności.

## Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Płeć:

- kobieta
- męszczyzna

Stan fizyczny:

- osoba aktywna, samodzielna
- osoba leżąca, wymagająca opieki

Rodzaj inkontynencji:

- inkontynencja moczowa
- inkontynencja kałowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: średnia / ciężka
- chłonność: 7/9

## Najważniejsze właściwości pieluchomajtek Super Seni Plus

**Zwiększone poczucie suchości** - unikalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewnia tym samym komfortowe poczucie suchości.

**Zapobieganie przeciekaniu** – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po założeniu pieluchomajtek osłonki równomiernie dopasowują się do ciała.

**Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień** – specjalnie zaprojektowana struktura warstwy zewnętrznej pieluchomajtek umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra ma zapewniony dostęp tlenu. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania odleżyn. Specjalna oddychająca włóknina została również zastosowana w skrzydłach bocznych pieluchomajtek, uzyskując w ten sposób swobodną cyrkulację powietrza w części biodrowej wyrobu.

**Informacja o konieczności zmiany pieluchy** - indykator wilgotności w formie nadruku lub kolorowych pasków informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się, a w przypadku pasków zmienia się ich kolor na niebiesko-zielony. Rozmycie nadruku lub zmiana koloru indykatora na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy.

**Redukcja nieprzyjemnego zapachu** - superabsorbent użyty w pieluchomajtkach, obok silnych właściwości chłonnych, posiada również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

## Pozostałe właściwości pieluchomajtek Super Seni Plus

**Lepsze dopasowanie do ciała i zwiększona swoboda ruchu** - idealne dopasowanie do ciała możliwe jest dzięki zastosowaniu przyklepcorzepów i elastycznego ściągacza taliowego znajdującego się w przedniej i tylnej części pieluchomajtek. Dzięki połączeniu tych cech pieluchomajtki są elastyczne na całym obwodzie, co zapewnia większą swobodę ruchów oraz poczucie komfortu. Po odpięciu przyklepcorzepty nie odkształcają się, więc możliwe jest ich wielokrotne użycie. Dodatkowo dzięki anatomicznemu kształtowi pieluchomajtki dopasowują się do ciała użytkownika zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych.

**Zachowanie dyskrecji i wygody** – zwężony wkład chłonny w kroku z obrzeży do części środkowej sprawia, że pieluchy lepiej dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności.

**Podwyższony komfort użytkownika** – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z pieluchomajtek.

**Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych** – zamiast lateksu pieluchomajtki Super Seni mają elementy z elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. Pieluchomajtki Super Seni poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

## Prosto o pieluchomajtkach Super Seni

Zachęcamy także do zapoznania się z filmem na temat pieluchomajtek Super Seni. Dowiedzą się Państwo między innymi:

- Komu polecane są pieluchomajtki?
- Dlaczego pieluchomajtki zapewniają skórze wysoki komfort?
- Jak wybrać odpowiedni rozmiar?

## Zakładanie pieluchomajtek Super Seni Plus

Pieluchomajtki przed założeniem należy aktywować. Dzięki temu, staną się bardziej miękkie, a wkład bardziej chłonny.

1. Rozłóż pieluchomajtki, chwyć je za dwa końce i lekko pociągnij.
2. Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i lekko rozciągnij.

## Jak samodzielnie zakładać pieluchomajtki Super Seni Plus?

1. Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi, trzymając je ułożone w formie łódki.
2. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.
3. Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry. Górne przylepcorzepy przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii.
4. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy ostonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało.
5. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

## Jak zakładać pieluchomajtki Super Seni Plus osobie leżącej?

1. Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Obróć podopiecznego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki. Połóż chorego z powrotem na plecach, wyprostuj jego nogi, a następnie wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.
2. Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
3. Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry. Górne przylepcorzepy przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii.
4. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy ostonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało.
5. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

## Dobór rozmiaru pieluchomajtek Super Seni Plus

Wybór produktu to nie tylko kwestia rodzaju wyrobu, ale również **dobór odpowiedniego rozmiaru**. Źle dobrana pielucha może przynieść szkody zarówno finansowe, jak i zdrowotne.

**Za mała pielucha** będzie uwierać i może powodować nieprzyjemne obtarcia w pasie czy w pachwinach. Dodatkowo może, także wywołać podrażnienie skóry, które w przypadku osób leżących szybko może przekształcić się w trudno gojące się rany.

**Za duża pielucha** będzie luźno leżeć, przez co bardzo prawdopodobne będą wycieki boczne, które nie tylko obniżą komfort, ale również podniosą koszty prania.

## Jak dobrać odpowiedni rozmiar pieluchomajtek Super Seni? Dostępne rozmiary.

- Używając miary krawieckiej, zmierz obwód w biodrach i w talii. Następnie odnieś te wartości do rozmiarów pieluchomajtek Seni ujętych w tabeli poniżej.
- Jeśli oba wymiary: obwód w talii i bioder mieszczą się w jednym z podanych w tabeli przedziałów - ten rozmiar wybierz.
- Jeśli wymiary talii i bioder znajdują się w dwóch różnych przedziałach, wybierz rozmiar na podstawie wymiaru większego.

## Chłonności pieluchomajtek Super Seni

### Seni - polska marka obecna na ponad 80 rynkach

**Seni** od lat towarzyszy osobom z nietrzymaniem moczu oraz opiekunom osób chorych i niepełnosprawnych, dostarczając im produkty chłonne i pielęgnacyjne doskonałej jakości.

Produkty **Seni** i **Seni Care** rekomendowane są, także przez personel Kliniki Budzik i Fundację Ewy Błaszczyk "Akogo?"

## Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Produkty **Seni** i **Seni Care** otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - ogólnonarodowej organizacji non-profit skupiającej naukowców, praktyków, gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych.

## Galeria

