

# Podkolanówki przeciwżylakowe MAXIS Cotton CCL2



Cena: 81,39 zł

## Opis słownikowy

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Producent | MAXIS                          |
| TYP       | palce zamknięte, palce otwarte |

## Opis produktu

**Podkolanówki uciskowe przeciwżylakowe MAXIS Cotton** ze względu na stopień ucisku (23-32 mmHg) zaliczane są do II klasy kompresji. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący zaś w kierunku łydki.

Podkolanówki dzięki zastosowaniu bawełny (28%) wchodzą w bezpośredni kontakt ze skórą oraz mikrofibry, która świetnie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała a także zapewnia miękkość i elastyczność, są przyjazne dla skóry. Poprzez zastosowanie technologii Silver& ALOE VERA produkt zapobiega rozwojowi bakterii, a tym samym powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, tworząc naturalny zapach skóry.

Jest to produkt medyczny przeciwżylakowy dlatego dedykowane są zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Siła kompresji produktów Maxis Cotton została potwierdzona certyfikatem RAL, opublikowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Standaryzacji Wyrobów Uciskowych. W dodatku cała seria Cotton posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 to znaczy, że są wolne od substancji szkodliwych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.

### SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)
- Opakowanie: 1 para,
- Skład: 28% bawełna, 41% poliamid, 31% elastan,
- Produkt dobrze kryjacy,
- Materiał ma matową powłokę,
- Pięta jest wzmocniona,
- Wygodna część palcowa,
- Do wyboru palce otwarte bądź zamknięte,
- Wyrób posiada właściwości absorbujące wilgoć na zewnątrz,
- Zawarty związek srebra posiada właściwości antygrzybicze oraz przeciwbakteryjne.

## PRZECIWSKAZANIA:

- Niewydolność serca,
- Spetyczne zapalenie żył,
- Stan zapalny.
- Zaawansowana choroba płuc.

## JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma kluczowe znaczenie. Nie może on być zbyt słaby, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować problemy z przepływem krwi w tętnicach kończyn dolnych.

| ROZMIAR | Owód (1cm) nad kostką | Obwód w najszerszym miejscu łydki | Obwód (4cm) pod kolaniem |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1       | 17-19cm               | 27-32cm                           | 26-31cm                  |
| 2       | 19-21cm               | 29-36cm                           | 28-35cm                  |
| 3       | 21-23cm               | 32-39cm                           | 31-38cm                  |
| 4       | 23-25cm               | 34-42cm                           | 33-44cm                  |
| 5       | 25-27cm               | 36-45cm                           | 35-44cm                  |
| 6       | 27-29cm               | 38-48cm                           | 37-47cm                  |
| 7       | 29-31cm               | 40-50cm                           | 39-49cm                  |
| 8       | 30-33cm               | 42-52cm                           | 41-51cm                  |

Dodatkowo należy zmierzyć długość nogi od punktu A do punktu D:

| DŁUGOŚĆ NOGI | CM    |
|--------------|-------|
| Krótkie      | 34-48 |
| Długie       | 39-44 |

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek zaleca się rano. Zakładanie należy rozpocząć od stopy, od palców do kostki, rozprowadzając materiał podkolanówki równomiernie na stopie. Należy zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić materiał na łydce zmniejszając naprężenie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. W celu zapobiegania przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

Rozmiar należy wybrać po zmierzeniu obwodu nogi w wybranych punktach określonych w tabeli rozmiarów.

#### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Produkty uciskowe maxis COTTON** to wyroby bardzo przyjazne w użyciu i dające poczucie bezpieczeństwa. Spełniają wszystkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii i dzięki temu pozwalają na szybszy powrót do zdrowia. Są bardzo komfortowe i wygodne w użyciu.

## Parametry

|         |                        |
|---------|------------------------|
| DŁUGOŚĆ | KRÓTKIE, NORMALNE      |
| KOLOR   | BEŻOWY                 |
| ROZMIAR | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

## Galeria

