


Podkolanówki przeciwżylakowe MAXIS MICRO CCL1

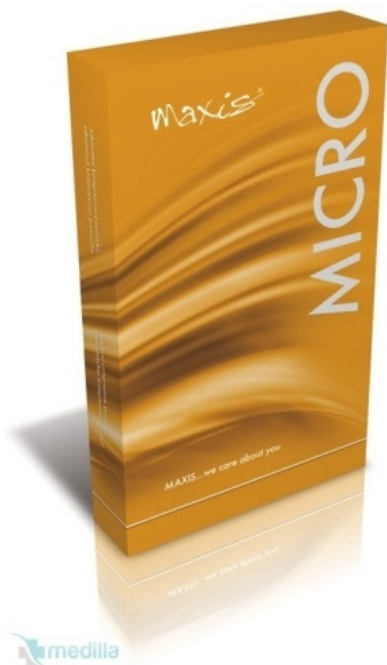

Opis produktu

Cena: 92,58 zł

Opis słownikowy

Producent	MAXIS
TYP	z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym

Podkolanówki uciskowe przeciwżylakowe Micro ze względu na stopień ucisku (18-21 mmHg) zaliczane są do I klasy kompresji. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący zaś w kierunku łydki.

Eleganckie produkty MAXIS posiadają drobny splot i dużą zawartości mikrowłókien. Podkolanówki **MAXIS MICRO** różnią się od innych podkolanówek uciskowych ze względu na zastosowanie efektu **MICRO**.

Jest to wyjątkowa technologia w, której wszystkie włókna Lycra* zostają oplecione zewnątrz i tym samym skóra nie ma bezpośredniego kontaktu z włóknem. Efekt MICRO obniża ryzyko podrażnienia skóry do minimum. Produkty MAXIS MICRO są odpowiednie dla delikatnej skóry. Wysoka elastyczność nowych materiałów znacznie ułatwia zakładanie podkolanówek, a ich noszenie jest dużo bardziej komfortowe. Jest to produkt medyczny przeciwżylakowy dlatego dedykowane są zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn

Siła kompresji produktów Maxis została potwierdzona certyfikatem RAL, opublikowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Standaryzacji Wyrobów Uciskowych. W dodatku cała seria posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 to znaczy, że są wolne

od substancji szkodliwych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: I (18-21 mmHg)
- Opakowanie: 1 para,
- Skład: poliamid 62% , elastan 38%,
- Produkt dobrze kryjacy,
- Pięta jest wzmocniona,
- Wygodna część palcowa,
- Do wyboru palce otwarte bądź zamknięte,

PRZECIWSKAZANIA:

- Zaawansowana choroba płuc,
- Niewydolność serca,
- Spetyczne zapalenie żył,
- Stan zapalny.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma kluczowe znaczenie. Nie może on być zbyt słaby, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować problemy z przepływem krwi w tętnicach kończyn dolnych.

ROZMIAR	Obwód (1cm) nad kostką	Obwód w najszerszym miejscu łydki	Obwód (4cm) pod kolanem
1	17-19cm	27-32cm	26-31cm
2	19-21cm	29-36cm	28-35cm
3	21-23cm	32-39cm	31-38cm
4	23-25cm	34-42cm	33-44cm
5	25-27cm	36-45cm	35-44cm
6	27-29cm	38-48cm	37-47cm
7	29-31cm	40-50cm	39-49cm
8	30-33cm	42-52cm	41-51cm

Dodatkowo należy zmierzyć długość nogi od punktu A do punktu D:

DŁUGOŚĆ NOGI	CM
Krótkie	34-48
Długie	39-44

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek zaleca się rano. Zakładanie należy rozpocząć od stopy, od palców do kostki, rozprowadzając materiał podkolanówki równomiernie na stopie. Należy zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie

rozprowadzić materiał na łydce zmniejszając naprężenie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. W celu zapobiegania przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

Rozmiar należy wybrać po zmierzeniu obwodu nogi w wybranych punktach określonych w tabeli rozmiarów.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:


Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Produkty uciskowe maxis MICRO to wyroby bardzo przyjazne w użyciu i dające poczucie bezpieczeństwa. Spełniają wszystkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii i dzięki temu pozwalają na szybszy powrót do zdrowia. Są bardzo komfortowe i wygodne w użyciu.

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	BRAZOWY, CZARNY, PIASKOWY
ROZMIAR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Galeria

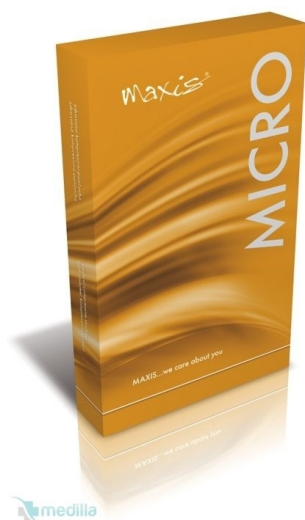

bronz - cielisty



piaskowe



czarne

