


Podkolanówki uciskowe JOBST forMEN Explore CCL2

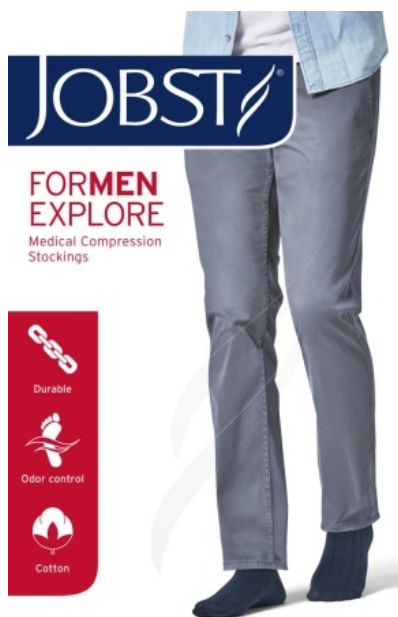

Cena: 192,99 zł

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe JOBST forMEN Explore CCL2 (2 klasa kompresji)

to męskie podkolanówki uciskowe przeznaczone do codziennego noszenia. JOBST forMEN Explore to połączenie zaawansowanej technologii, dobrego stylu i męskiej elegancji. Są bardzo wygodne i sprawdzą się w każdej sytuacji. Dzięki wykrozystaniu innowacyjnych materiałów zapewniają kompresję tak potrzebną do profilaktyki i leczenia żylaków oraz różnych problemów żylnych.

Czym wyróżniają się podkolanówki JOBST forMEN Explore:

- **BAWEŁNIANE** - wysokiej jakości bawełna zapewnia komfort noszenia osobom o wrażliwej skórze
- **NEUTRALIZUJĄ ZAPACHY** - włókna z węglem aktywnym skutecznie neutralizują zapachy
- **WYTRZYMAŁE** - wzmocnione okolice pięt i palców gwarantują możliwość długiego stosowania

UWAGA - występują jedynie w wersji z palcami zamkniętymi i długości Regular.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 2 (23-32 mmHg)
- Przeznaczone dla mężczyzn
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi
- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Struktura w delikatne prążki

- Występują w kolorach czarnym i granatowym

Uwaga:

Produkt występuje jedynie w długości REGULAR.

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

KOLOR	GRANATOWY, CZARNY
ROZMIAR	1, 2, 3, 4, 5, 6

Galeria

