

Podkolanówki uciskowe JOBST Opaque 2 klasa (CCL2)



Cena: 169,99 zł

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe JOBST Opaque CCL2 (2 klasa

kompresji) to połączenie skuteczności medycznej z elegancją i wygodą. Idealne dla kobiet lubiących dobrze wyglądać i ceniących wysoką jakość oraz wysoki komfort noszenia.

UWAGA - występują jedynie w wersji z palcami zamkniętymi i długości Regular.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 2 (23-32 mmHg)
- Skład: Nylon, Spandex
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, kryjące i eleganckie
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi
- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Technologia odprowadzająca wilgoć
- SoftFit - specjalne wykończenie podkolanówek gwarantujące najlepsze przyleganie i pozostawanie podkolanówki na miejscu.

Uwaga:

Produkt występuje jedynie w długości REGULAR.

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiary należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

KOLOR	NATURALNY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI

Galeria



	I	II	III
cD	27 - 33 cm	29 - 36cm	32 - 39 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm

	IV	V	VI
cD	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

LD Petite: 34 - 39 cm / Regular: 39 - 45 cm



