

## Podkolanówki uciskowe JOBST Travel CCL1



Cena: 115,99 zł

Opis słownikowy

Producent      JOBST

Opis produktu

### Podkolanówki uciskowe JOBST Travel CCL1 (1 klasa kompresji)

to uciskowe podkolanówki stworzone specjalnie dla podróżujących. JOBST Travel poprawiają krążenie w nogach oraz zapobiegają puchnięciu nóg i zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów. Do tego podkolanówki JOBST Travel są bardzo wygodne, wykonane z oddychającego materiału i wyglądają jak normalne skarpetki.

Czym wyróżniają się podkolanówki JOBST Travel:

- **IDEALNE W PODRÓŻY** - stworzone specjalnie dla osób odbywających wielogodzinne podróże
- **ZMNIEJSZAJĄ UCZUCIE OPUCHNIĘTYCH NÓG** - przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie ciężkich i opuchniętych nóg
- **ODDYCHAJĄCE** - materiał przepuszcza powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień
- **ODPROWADZAJĄCE WILGOĆ** - pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

## SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 1 (15-20 mmHg)
- Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi
- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Występują w kolorach czarnym i beżowym

## WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

## JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach

- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

## Parametry



KOLOR	BEŻOWY, CZARNY
ROZMIAR	1, 2, 3, 4, 5

## Galeria



### JOBST Travel

Zapobiegające zakrzepicy żył głębokich w czasie podróży

-  Pomagające zmniejszać obrzęki  
Poprawiają krążenie krwi
-  Podróżne  
Wspierają zdrowie nóg
-  Oddychające  
Pozwalają na przepływ powietrza



