

Podkolanówki uciskowe MEDI Mediven Active CCL2



Cena: 199,99 zł

Opis słownikowy

Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe dla mężczyzn MEDI Mediven Active CCL2

(2 klasa kompresji) to wzmocnione skarpety uciskowe dla mężczyzn. Wykonane zostały specjalną techniką tkania dzięki czemu skarpeta ma szew przy palcach, który jest niewyczuwalny. Wyjątkowo miękka i wygodna podeszwa oraz wzmocniona pięta są dodatkowymi przekonującymi cechami tego produktu. Każda skarpeta pasuje jak druga skóra.

Dzięki specjalnej, drobnej, prążkowanej strukturze skarpety mediven active nie przypominają medycznego produktu uciskowego, co sprawia, że są one jeszcze bardziej pożądane.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)
- Skład: 89% poliamid, 11% elastan
- Bardzo miękki i elastyczny materiał ułatwiający zakładanie i

zdejmowanie

- Dzięki lanolinie pielęgnuje i chroni skórę
- Prążkowany, kryjący materiał
- Optymalny komfort noszenia i duża przepuszczalność powietrza dzięki Clima Comfort
- Idealne dopasowanie dzięki elastycznym i wzmocnionym wstawkom, zapewniającym wygodę - system Perfect Fit
- Jeszcze lepsze dopasowanie do kształtu stopy
- Odpowiednie dla rozmiaru stopy od 38 do 48

Uwaga:

Rozmiar I i VII, kolory biały, granatowy, brązowy, antracytowy - tylko na zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

WSKAZANIA:

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żyłaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C2 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 43-49

SHORT – długość 37-42

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Podkolanówki należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Podkolanówki należy następnie kilkakrotnie wypłukać. Po praniu zaleca się powiesić podkolanówkę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Produktów medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

DŁUGOŚĆ	NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	BIAŁY, BRAZOWY, GRANATOWY, ANTRACYTOWY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

Galeria

