

## Podkolanówki uciskowe MEDI Mediven Elegance CCL1



Cena: 216,99 zł

### Opis słownikowy

Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte, palce otwarte - na zamówienie

### Opis produktu

**Podkolanówki uciskowe MEDI Mediven Elegance CCL1 (1 klasa kompresji)** to połączenie skuteczności medycznej z szeroką gamą modeli i kolorów. Duża paleta kolorów dostosowuje się do każdej mody i każdego stylu. Idealne dla kobiet lubiących dobrze wyglądać i ceniących wysoką jakość.

### SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: I (18-21 mmHg)
- Skład: Poliamid, elastan
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, lekko przezroczyste i bardzo eleganckie
- Standardowo występują w wersji z palcami odkrytymi
- Łatwiejsze zakładanie, zdejmowanie oraz jeszcze lepsze dopasowanie dzięki nowej technologii włókien
- Jeszcze bardziej miękkie podczas noszenia i bardziej przezroczyste w wyglądzie

- Ulepszona technologia Clima Comfort zapewniająca uczucie lżejszych nóg i mniejsze pocenie
- Soft Elastic dla większej swobody palców i większej wygody w odcinku przedstopia
- Mniejsza pięta pozwalająca na dopasowanie bez zmarszczeń. Nie rzucająca się w oczy w butach i szczególnie wytrzymała dzięki podwójnemu wzmocnieniu

## Uwaga:

Rozmiar I i VII, produkty z palcami otwartymi, a także produkty w kolorach: biały, granatowy, antracyt, magenta - tylko na specjalne zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

## WSKAZANIA:

- Żylaki pierwotne i wtórne oraz żylaki i obrzęki w okresie ciąży
- Niewydolność żył głównych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) oraz stany po wyleczonym zapaleniu żył
- Profilaktycznie w celu zapobiegania zakrzepicy i w stanach po przebytej zakrzepicy
- Zespół pozakrzepicowy
- Chroniczna niewydolność żył od I do III stadium według Widmera
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Obrzęk limfatyczny i lipemiczny
- Cykliczne obrzęki samoistne
- Angiodysplazja
- Pomocniczo w leczeniu stwardnienia naczyń i po operacjach żył
- Zatory w wyniku unieruchomienia (artogeniczny zespół zatorowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 39-44

SHORT – długość 34-38

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić

wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

### Parametry

DŁUGOŚĆ	NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	BIAŁY, BEŻOWY, GRANATOWY, ANTRACYT, KARMELOWY, CZARNY, KASZMIROWY, MAGENTA
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

## Galeria



