

Podkolanówki uciskowe MEDI Mediven For Men CCL2



Cena: 199,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------|-----------------|
| Producent | MEDI |
| TYP | palce zamknięte |

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe dla mężczyzn MEDI Mediven For

Men CCL2 (2 klasa kompresji) to modne, atrakcyjne podkolanówki uciskowe dla mężczyzn. Mediven for men to podkolanówki anatomicznie dopasowane do pięt i palców - posiadają rozróżnienie na stopę prawą i lewą. Specjalna struktura materiału przeznaczona typowo dla mężczyzn. Produkt bardzo miękki, gładki i wysoce elastyczny.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)
- Skład: 71% poliamid, 29% elastan
- Część na stopę w kształcie anatomicznym, z rozróżnieniem stopy prawej i lewej
- Modna prążkowana faktura
- Zawiera lanolinę dla efektywnej pielęgnacji skóry
- Opatentowany system Clima Fresh zapewnia stopie więcej świeżości i działa przeciwbakteryjne

- Dzięki systemowi Clima Comfort zapewniają dużą przepuszczalność powietrza i niezawodną regulację temperatury
- Odpowiedni dla rozmiaru buta od 39 do 46

Uwaga:

Rozmiar I i VII, kolory granatowy, brązowy, antracytowy - tylko na zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

W przypadku zamówienia większej ilości z jednego rozmiaru i koloru czas oczekiwania może się wydłużyć do 7 dni roboczych.

WSKAZANIA:

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żylaków
- Przewlekłe choroby żylnie: Etapy C0 do C2 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchowne) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Normalna/ NORMAL – AD długość 39-44
Krótka/ SHORT – długość 34-38

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Podkolanówki należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Podkolanówki należy następnie kilkakrotnie wypłukać. Po praniu zaleca się powiesić podkolanówkę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Produktów medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

| | |
|---------|--|
| DŁUGOŚĆ | NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT) |
| KOLOR | BRAZOWY, GRANATOWY, ANTRACYT, CZARNY |
| ROZMIAR | I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie |

Galeria



