

Podkolanówki uciskowe MEDI Mediven Forte CCL3



Cena: 209,99 zł

Opis słownikowy

Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte - stopa 39-43, palce zamknięte - stopa 36-38, palce otwarte

Opis produktu

Mocne podkolanówki uciskowe MEDI Mediven Forte CCL3 (3 klasa kompresji) to podkolanówki uciskowe w ciężkich chorobach żył. Uciskowe podkolanówki Mediven forte to maksymalna stabilność ucisku przez całą dzień, oraz duży ucisk roboczy zapewniający głębokie działanie i ekstremalną wytrzymałość. Mediven forte to niezawodna terapia kompresyjna w ciężkich wskazaniach.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: III (34-46 mmHg)
- Skład: 74% poliamid, 26% elastan
- Głębokie działanie funkcjonalne w ciężkich wskazaniach
- Higieniczna świeżość dzięki działaniu przeciwbakteryjnemu
- Bardzo elastyczna, bezszwowa i antypoślizgowa podkolanówka
- Opatentowany system Climafresh zapewnia higieniczną świeżość i działanie przeciwbakteryjne
- Clima-Comfort gwarantuje dużą przepuszczalność powietrza i

niezawodną regulację temperatury.

Uwaga:

Rozmiar I i VII, produkty z palcami zamkniętymi - tylko na zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

WSKAZANIA:

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żylaków
- Przewlekłe choroby żylnie: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 38-43

SHORT – długość 33-37

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Podkolanówki uciskowe należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Uciskowe podkolanówki należy następnie kilkakrotnie wypluć. Po praniu zaleca się powiesić podkolanówkę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać

wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Produktów medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

DŁUGOŚĆ	NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	KARMELOWY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

Galeria

