

# Pończocha pozabiegowa SIGVARIS TOP FINE CCL2 Piaskowa



Cena: 93,65 zł

## Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
TYP	z czubkiem otwartym

## Opis produktu

### Pończocha pozabiegowa SIGVARIS TOP FINE CCL2 w kolorze Piaskowym

Pończocha pozabiegowa jest wyrobem uciskowym linii Essential CLASSICAL. Należy do wyrobów nieprzezroczystych dzięki czemu dyskretnie towarzyszy nam w codziennych sytuacjach. Dzięki zintegrowanym mikrowłóknom podczas użytkowania zapewnia przyjemność i wygodę.

#### SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)
- Skład: 68% poliamid, 32% elastan

W opakowaniu znajduje się jedna pojedyncza pończocha. Producent pakuje produkt zarówno w kartonik jak i w woreczek strunowy. Zamówiony przedmiot wysyłamy losowo w zależności od otrzymanej dostawy.

## Cechy i właściwości

- dyskretny wygląd
- dla kobiet i mężczyzn (unisex)
- przyjemność i wygoda
- potwierdzona jakość
- w opakowaniu znajduje się jedna sztuka

## JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Długość w cm					
krótkie	33 - 37	krótkie	61 - 70	krótkie	61 - 70
długie	38 - 44	długie	71 - 80	długie	71 - 80



	Obwód w cm					
	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus
<b>CT</b>	do 80	do 80	do 90	do 90	do 100	do 100
<b>CH</b>	do 110	do 110	do 120	do 120	do 130	do 130
<b>CG</b>	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
<b>CF</b>	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
<b>CE</b>	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
<b>CD</b>	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
<b>CC</b>	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
<b>CB<sub>1</sub></b>	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
<b>CB</b>	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
<b>CY</b>	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
<b>CA</b>	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Do zakładania i zdejmowania wyrobów uciskowych najlepiej używać gumowych rękawic SIGVARIS lub innych akcesoriów do tego przeznaczonych. Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć pończoch czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie pończoch medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.


## PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

Zaawansowana choroba okluzyjna tętnic obwodowych, bolesny siniczny obrzęk kończyny, septyczne zapalenie żył, zastoinowa niewydolność serca.

### Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
ROZMIAR	S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS

## Galeria

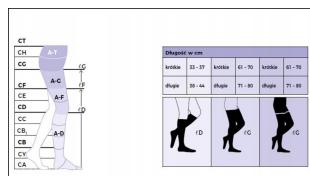

Oznaczenie	Długość w cm				
	S	M	M	L	XL
CT	40-42	41-43	42-44	43-45	44-46
CH	46-48	47-49	48-50	49-51	50-52
CG	42-44	43-45	44-46	45-47	46-48
CE	43-45	44-46	45-47	46-48	47-49
CF	39-41	40-42	41-43	42-44	43-45
CD	24-26	25-27	26-28	27-29	28-30
CC	31-33	32-34	33-35	34-36	35-37
CB	29-31	30-32	31-33	32-34	33-35
CB	19-21	20-22	21-23	22-24	23-25
CA	19-21	19-21	21-23	23-25	25-27


easy to use  
**Convenient**  
 łatwe zakładanie  
 i zdejmowanie



pleasant wearing comfort  
**Comfortable**  
 wysoki komfort noszenia



opaque  
**Attractive**  
 nieprzezroczyste, doskonale maskują  
 strefy problemów żylnych

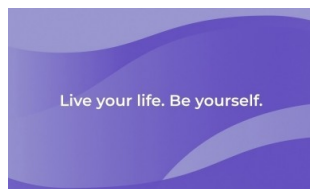

# sigvaris