

## Pończochy przeciwzakrzepowe JOBST COMPRINET PRO



Cena: 69,50 zł

Opis słownikowy

Producent	JOBST
-----------	-------

Opis produktu

**Pończochy przeciwzakrzepowe JOBST COMPRINET PRO (1 klasa kompresji)** to pończochy, które skutecznie zapobiegają zakrzepicy oraz zatorowości płucnej u osób leżących. Łączą skuteczność medyczną i bezpieczeństwo z komfortem i wygodą pacjentów i użytkowników.

### SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: CCL1
- Kolor: Biały
- Wersja: Okienko rewizyjne
- Długość: Regular

Pończochy przeciwzakrzepowe, które skutecznie zapobiegają zakrzepicy oraz zatorowości płucnej u osób leżących. Łączą skuteczność medyczną i bezpieczeństwo z komfortem i wygodą pacjentów i użytkowników. Uwaga:

## Czym wyróżniają się pończochy przeciwzakrzepowe JOBST COMPRINET PRO:

- **STOPNIOWALNA KOMPRESJA**

Kompresja w wyrobach Comprinet® pro wynosi na poziomie kostki około 18 mmHg i zmniejsza się stopniowo od części dystalnych do proksymalnych. Skutecznie zwiększa przepływ krwi do serca, zapobiega zastojom żylnym i tworzeniu się zakrzepów w układzie żył głębokich.

- **DWUKIERUNKOWA ROZCIĄGLIWOŚĆ**

Miękka, przyjazna dla skóry i przepuszczająca powietrze dzianina zapewnia komfort. Rozciągliwość wzdłużna i poprzeczna w połączeniu z profilowaniem kształtu nogi gwarantuje prawidłowy gradient ciśnienia, nawet w przypadku ekstremalnych kończyn.

- **ANATOMICZNE DOPASOWANIE**

Wyprofilowanie piety i stopy, dzianina bez dodatku lateksu, antypoślizgowe wykończenie ud dają stabilne dopasowanie wyrobów i utrzymywanie się wyrobu na nogach z zachowaniem optymalnego gradientu ciśnienia.

- **OKIENKO REWIZYJNE**

Okienko rewizyjne u nasady palców po stronie grzbietowej stopy pozwala na łatwą i szybką ocenę bezpieczeństwa.

### **WSKAZANIA:**

Profilaktyka zakrzepicy u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym a także u pacjentów, którzy przez dłuższy czas są unieruchomieni.

**Jak dobrać odpowiedni rozmiar - pomiar KROK po KROKU.**

**Prawidłowy pomiar i dobór rozmiaru pończoch Comprinet® pro ma kluczowy wpływ na ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie.**

### **Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych miejscach:**

**cB** – obwód nogi w najwęższym miejscu tuż nad kostką,

**cC** – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,

**cF** – obwód w połowie uda,

**cG** – obwód uda 3 cm poniżej pachwiny.

**Dobór rozmiaru dotyczącego obwodów determinuje pomiar łydki w najszerszym miejscu (punkt cC).**

**Krok 2: zmierz długość nogi – długość nogi mierzona jest od pięty do wysokości pośladka.**

**Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.**

**Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.**

## **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**

### **SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:**

Prać w programach delikatnych, w maksymalnej temperaturze 90o C. Nie stosować wybielaczy i nie prasować. Można suszyć w suszarce bębnowej, w maksymalnej temperatura 95o C.

Trwała dzianina Comprinet® pro na bazie włókien poliamidowych gwarantuje kompresje na właściwym poziomie do 10 prań.

### **PRZECIWSKAZANIA:**

- niedokrwienie (np. zaawansowana choroba tętnic)
- niekontrolowana, zastoinowa niewydolność serca
- septyczne zapalenie żył
- siniczny obrzęk bolesny

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

Stosować tylko po konsultacji lekarskiej w przypadkach: zakażenia skóry, sączącej dermatozy, reakcje niedostosowania do materiału, zaburzenia wrażliwości, u pacjentów przyjmujących leki wazopresyjne, które mogą powodować skurcz naczyń obwodowych oraz u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

## Parametry


ROZMIAR

3, 5

## Galeria



Wzrost	Obręcz bioder (D)	Obręcz uda (D)	Waga	Waga całkowita (D)	Obręcz kostki (D)	Obręcz łydki (D)	Max. obręcz łydki (D)
3	80-90 cm	64-70 cm	50-60 kg	50-60 kg	24-26 cm	40-45 cm	48 cm
5	100-110 cm	84-90 cm	70-80 kg	70-80 kg	26-28 cm	50-55 cm	58 cm

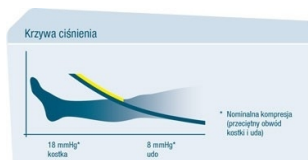

**LATEX  
FREE  
FORMULA**

