


## Pończochy szerokie MEDI Mediven Forte CCL3

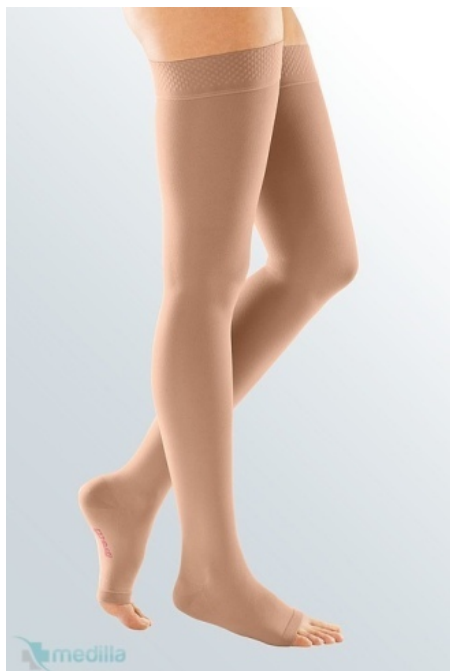

Cena: 339,99 zł

### Opis słownikowy

Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte - stopa 39-43, palce zamknięte - stopa 36-38, palce otwarte
ŚCIAĞACZ	EXTRA SZEROKI - NA ZAMÓWIENIE

### Opis produktu

**Mocne pończochy uciskowe MEDI Mediven Forte CCL3 (3 klasa kompresji) z ekstraszerekim ściągaczem** to pończochy uciskowe w ciężkich chorobach żył. Mediven forte to maksymalna stabilność ucisku przez cały dzień oraz duży ucisk roboczy zapewniający głębokie działanie i ekstremalną wytrzymałość. Mediven forte to niezawodna terapia kompresyjna w ciężkich wskazaniach.

### SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: III (34-46 mmHg)
- Skład: 74% poliamid, 26% elastan
- Głębokie działanie funkcjonalne w ciężkich wskazaniach
- Higieniczna świeżość dzięki działaniu przeciwbakteryjnemu
- Bardzo elastyczna, bezszwowa i antypoślizgowa podkolanówka
- Opatentowany system Climafresh zapewnia higieniczną świeżość i działanie przeciwbakteryjne
- Clima-Comfort gwarantuje dużą przepuszczalność powietrza i

niezawodną regulację temperatury.

## Uwaga:

Rozmiar I i VII, produkty z palcami zamkniętymi - tylko na zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

## WSKAZANIA:

- Żylaki
  - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
  - Żylaki w ciąży
  - Wsparcie w skleroterapii
  - Po operacji żylaków
- Przewlekłe choroby żylnie: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 72-83

SHORT – długość 62-71

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć pończoch czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać. Po praniu zaleca się powiesić pończochy do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w

ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.  
Produktów medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

## BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

### Parametry

DŁUGOŚĆ	NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	KARMELOWY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

### Galeria

