

Pończochy uciskowe MEDI Mediven Elegance CCL1



Cena: 302,49 zł

Opis słownikowy

MANKIET	STANDARDOWY
Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte, palce otwarte - na zamówienie
ŚCIĄGACZ	STANDARDOWY

Opis produktu

Pończochy samonośne uciskowe MEDI Mediven Elegance CCL1 (1 klasa kompresji) to połączenie skuteczności medycznej z szeroką gamą modeli i kolorów. Duża paleta kolorów dostosowuje się do każdej mody i każdego stylu. Pończochy samonośne uciskowe MEDI Mediven Elegance CCL1 są idealne dla kobiet lubiących dobrze wyglądać i ceniących wysoką jakość.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 1 (18-21 mmHg)
- Skład: Poliamid, elastan
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, lekko przezroczyste i bardzo eleganckie
- Pończochy samonośne uciskowe MEDI Mediven Elegance standardowo występują w wersji z palcami odkrytymi
- Łatwiejsze zakładanie, zdejmowanie oraz jeszcze lepsze dopasowanie dzięki nowej technologii włókien

- Jeszcze bardziej miękkie podczas noszenia i bardziej przezroczyste w wyglądzie
- Ulepszona technologia Clima Comfort zapewniająca uczucie lżejszych nóg i mniejsze pocenie
- Soft Elastic dla większej swobody palców i większej wygody w odcinku przedstopia
- Mniejsza pięta pozwalająca na dopasowanie bez zmarszczeń. Nie rzucająca się w oczy w butach i szczególnie wytrzymała dzięki podwójnemu wzmocnieniu

Pończochy można dodatkowo ozdobić kryształkami Swarovskiego - w tym celu prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Uwaga:

Rozmiar I i VII, produkty z palcami otwartymi, a także produkty w kolorach: biały, granatowy, antracyt, magenta - tylko na specjalne zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

WSKAZANIA:

- Żylaki pierwotne i wtórne oraz żylaki i obrzęki w okresie ciąży
- Niewydolność żył głównych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) oraz stany po wyleczonym zapaleniu żył
- Profilaktycznie w celu zapobiegania zakrzepicy i w stanach po przebytej zakrzepicy
- Zespół pozakrzepicowy
- Chroniczna niewydolność żył od I do III stadium według Widmera
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Obrzęk limfatyczny i lipemiczny
- Cykliczne obrzęki samoistne
- Angiodysplazja
- Pomocniczo w leczeniu stwardnienia naczyń i po operacjach żył
- Zatory w wyniku unieruchomienia (artogeniczny zespół zatorowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 72-83

SHORT – długość 62-71

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć pończoch czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

DŁUGOŚĆ	NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	BIAŁY, BEŻOWY, GRANATOWY, KARMELOWY, ANTRACYTOWY, CZARNY, MAGENTA, DIAMOND, PIASKOWY, MONTANA, SIENA - CIEMNY BRĄZOWY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

Galeria

