


Rajstopy przeciwżylakowe MAXIS MICRO CCL2

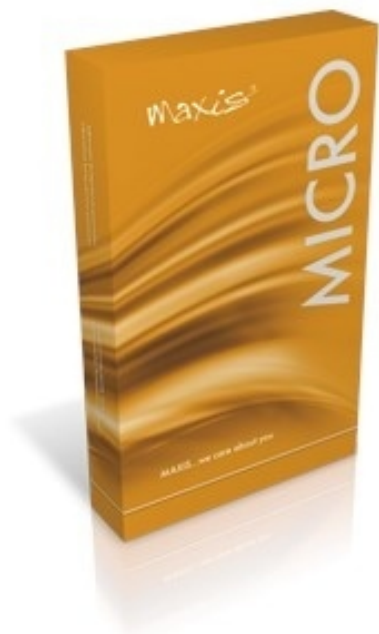

Cena: 162,95 zł

Opis słownikowy

Producent	MAXIS
TYP	z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym

Opis produktu

Rajstopy uciskowe przeciwżylakowe Micro ze względu na stopień ucisku (23-32 mmHg) zaliczane są do II klasy kompresji. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący zaś w kierunku łydki.

Eleganckie produkty MAXIS posiadają drobny splot i dużą zawartości mikrowłókien. Podkolanówki **MAXIS MICRO** różnią się od innych podkolanówek uciskowych ze względu na zastosowanie efektu **MICRO**.

Jest to wyjątkowa technologia w, której wszystkie włókna Lycra* zostają oplecione zewnątrz i tym samym skóra nie ma bezpośredniego kontaktu z włóknem.

Efekt MICRO obniża ryzyko podrażnienia skóry do minimum. Produkty MAXIS MICRO są odpowiednie dla delikatnej skóry. Wysoka elastyczność nowych materiałów znacznie ułatwia zakładanie podkolanówek, a ich noszenie jest dużo bardziej komfortowe.

Jest to produkt medyczny przeciwżylakowy dlatego dedykowane są zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn

Siła kompresji produktów Maxis została potwierdzona certyfikatem RAL,

opublikowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Standaryzacji Wyrobów Uciskowych. W dodatku cała seria posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 to znaczy, że są wolne od substancji szkodliwych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: I (23-32 mmHg)
- Opakowanie: 1 para,
- Skład: poliamid 62% , elastan 38%,
- Produkt dobrze kryjący,
- Pięta jest wzmocniona,
- Wygodna część palcowa,
- Do wyboru palce otwarte bądź zamknięte,

PRZECIWSKAZANIA:

- Zaawansowana choroba płuc,
- Niewydolność serca,
- Spetyczne zapalenie żył,
- Stan zapalny.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma kluczowe znaczenie. Nie może on być zbyt słaby, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować problemy z przepływem krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Dodatkowo należy zmierzyć długość nogi od pięty do 4cm poniżej fałdu pośladka

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie zaleca się rano. Zakładanie należy rozpocząć od stopy, od palców do kostki, rozprowadzając materiał równomiernie na stopie. Należy zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić materiał na łydce zmniejszając napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. W celu zapobiegania przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym. Rozmiar należy wybrać po zmierzeniu obwodu nogi w wybranych punktach określonych w tabeli rozmiarów.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:


Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Produkty uciskowe maxis MICRO to wyroby bardzo przyjazne w użyciu i dające poczucie bezpieczeństwa. Spełniają wszystkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii i dzięki temu pozwalają na szybszy powrót do zdrowia. Są bardzo komfortowe i wygodne w użyciu.

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	BRAZOWY, CZARNY, PIASKOWY
ROZMIAR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Galeria

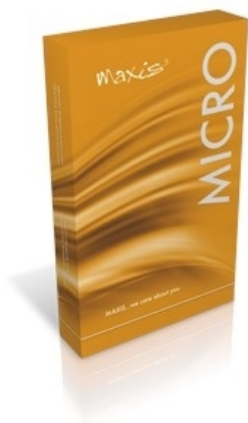

piaskowe



czarne