

Rajstopy uciskowe JOBST Opaque 1 klasa (CCL1)



Cena: 259,99 zł

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu

Rajstopy uciskowe JOBST Opaque CCL1. (1 klasa kompresji) to połączenie skuteczności medycznej z elegancją i wygodą. Idealne dla kobiet lubiących dobrze wyglądać i ceniących wysoką jakość oraz wysoki komfort noszenia.

Rajstopy JOBST Opaque to rajstopy dla osób z lekkimi i średnimi problemami żylnymi:

- zmęczonymi i opuchniętymi nogami
- z pajęczkami
- z żylakami i przewlekłą chorobą żylną
- w profilaktyce chorób żylnych

UWAGA - występują jedynie w wersji z palcami zamkniętymi i długości Regular.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 1 (18-21 mmHg)
- Skład: Nylon, Spandex
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, kryjące i eleganckie
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi

- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Technologia odprowadzająca wilgoć

Uwaga:

Produkt występuje jedynie w długości REGULAR.

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie rajstop medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć rajstop czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

KOLOR	NATURALNY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI

Galeria



Wytrzymałe
Wzmocnione okolice pięt i palców gwarantują
możliwość długiego stosowania



Odprowadzające wilgoć
Pomagają utrzymać skórę
w suchości przez cały dzień



Miękkie w dotyku
Mieszanka delikatnych
dla skóry włókien



Kryjące
Maskują drobne niedoskonałości
i zapewniają stylowy wygląd