

Rajstopy uciskowe JOBST UltraSheer CCL2 (2 klasa)



Cena: 259,99 zł

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu

Rajstopy uciskowe JOBST UltraSheer CCL2 (2 klasa kompresji)

to eleganckie, cienkie i transparentne produkty uciskowe, które wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są **łatwe do nakładania i zdejmowania**, doskonale dopasowują się do kształtu ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.

Czym wyróżniają się rajstopy JOBST UltraSheer:

- **TRANSPARENTNE** - cienki, przejrzysty materiał zapewnia elegancji wygląd
- **ODDYCHAJĄCE** - przepuszczają powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień
- **LŚNIĄCE** - delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo
- **ODPROWADZAJĄCE WILGOĆ** - pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

UWAGA - występują jedynie w wersji z palcami zamkniętymi i długości Regular.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: 2 (23-32 mmHg)
- Skład: Nylon, Spandex
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, kryjące i eleganckie
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi
- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Technologia odprowadzająca wilgoć

Uwaga:

Produkt występuje jedynie w długości REGULAR.

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie rajstop medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć rajstop czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

KOLOR	NATURALNY, CZARNY
ROZMIAR	I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI

Galeria

