

Rajstopy uciskowe MEDI Mediven Sheer&Soft CCL1



Cena: 304,99 zł

Opis słownikowy

Producent	MEDI
TYP	palce zamknięte, palce otwarte - na zamówienie, z czubkiem otwartym

Opis produktu

Rajstopy uciskowe MEDI Mediven Sheer&Soft CCL1 (1 klasa

kompresji) to niezwykle modne i efektowne medyczne rajstopy uciskowe, przeznaczone dla nowoczesnych kobiet, dla których modny wygląd ma bardzo duże znaczenie. Produkt wykonany z bardzo przezroczystej tkaniny, który nie przypomina produktu medycznego.

Spróbuj – tylko Ty będziesz wiedziała, że nosisz produkt medyczny.

SZCZEGÓŁY:

- Klasa kompresji: I (15-20 mmHg)
- Skład: 56% poliamid, 44% elastan
- Przeznaczone dla kobiet: gładkie, wyjątkowo przezroczyste i bardzo eleganckie
- Bardzo miękka i przyjazna dla skóry tkanina
- Występują w wersji z palcami odkrytymi i zakrytymi
- Ulepszona technologia Clima Comfort zapewniająca uczucie lżejszych nóg i mniejsze pocenie

Uwaga:

Rozmiar I i VII, produkty z palcami otwartymi - tylko na zamówienie, po przedpłacie na konto, bez możliwości zwrotu oraz wymiany. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

WSKAZANIA:

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żyłaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C2 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

NORMAL – długość 72-83

SHORT – długość 62-71

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie rajstop medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć rajstop czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Rajstopy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Rajstopy należy następnie kilkakrotnie wypłukać. Po praniu zaleca się powiesić rajstopy do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Produktów medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, NORMALNE, KRÓTKIE (SHORT)
KOLOR	BIAŁY, BEŻOWY, CZARNY
ROZMIAR	UNIWERSALNY, I - na zamówienie, II, III, IV, V, VI, VII - na zamówienie

Galeria

