

SIGVARIS COTTON Pończochy uciskowe 1 klasa CCL1

Cena: 282,99 zł



Opis słownikowy

MANKIET	MANKIET SAMONOŚNY QUADRINOVA
Producent	SIGVARIS
TYP	z czubkiem otwartym

Opis produktu

Medyczne pończochy SIGVARIS COTTON 1 stopnia kompresji to najwyższy komfort dla wrażliwej skóry.

Włókna bawełny, wykorzystane w produktach COTTON, pokrywają ich wewnętrzną stronę, przez co mają bezpośredni kontakt ze skórą. Dzięki naturalnym właściwościom bawełny, produkty COTTON są odpowiednie dla osób z wrażliwą skórą, zapewniając im większy komfort i lepsze samopoczucie.

Mieszanka włókien zapewnia także utrzymanie zrównoważonej temperatury w zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Pończochy występują w kolorze naturalny w wersji z czubkiem otwartym.

UWAGA!! Część produktów posiadamy na stanie, a część produktów zamawiamy bezpośrednio u producenta SIGVARIS w związku z tym niektóre warianty rozmiarowe mogą być pod zamówienie, a czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni. O wydłużonym czasie realizacji klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: I (18-21 mmHg)

Skład: 52% poliamid, 34% elastan, 14% cotton

Opakowanie: 1 para

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Średnie – długość 65-74

Długie – długość 75-84

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie pończoch medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

Parametry

DŁUGOŚĆ	ŚREDNIE, DŁUGIE
KOLOR	NATURALNY
ROZMIAR	XS, XS PLUS, S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS

Galeria




medilla



Rodzaje mankietów:

mankiet samonośny Sensinova

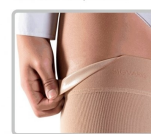

mankiet samonośny QUADRINOVA



medilla