

SIGVARIS COTTON Pończochy uciskowe 2 klasa

Cena: 282,99 zł



Opis słownikowy

MANKIET	MANKIET SAMONOŚNY QUADRINOVA
Producent	SIGVARIS
TYP	z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym

Opis produktu

Medyczne pończochy SIGVARIS COTTON to najwyższy komfort dla wrażliwej skóry.

Włókna bawełny, wykorzystane w produktach COTTON, pokrywają ich wewnętrzną stronę, przez co mają bezpośredni kontakt ze skórą. Dzięki naturalnym właściwościom bawełny, produkty COTTON są odpowiednie dla osób z wrażliwą skórą, zapewniając im większy komfort i lepsze samopoczucie.

Mieszanka włókien zapewnia także utrzymanie zrównoważonej temperatury w zmieniających się warunkach atmosferycznych. Pończochy 2 klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Pończochy występują w wersji z czubkiem zamkniętym lub otwartym.

SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)

Skład: 52% poliamid, 34% elastan, 14% cotton

Opakowanie: 1 para

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Krótkie – długość 56-64

Średnie – długość 65-74

Długie – długość 75-84

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć rajstop czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie pończoch medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, ŚREDNIE, DŁUGIE
KOLOR	NATURALNY, BEŻOWY, CZARNY
ROZMIAR	XS, XS PLUS, S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS, XL

Galeria




medilla




Rodzaje mankietów:

mankiet samonośny Sensinova

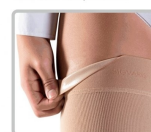

mankiet samonośny QUADRINOVA

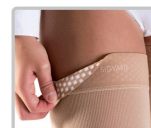

medilla