


# SIGVARIS Thrombo Pończochy przeciwzakrzepowe

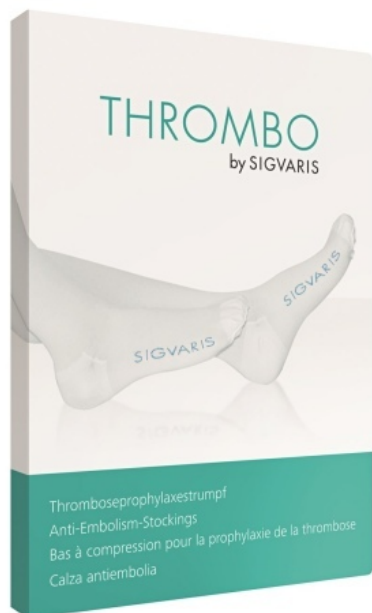

medilla

Cena: 124,99 zł

## Opis słownikowy

Producent SIGVARIS

## Opis produktu

SIGVARIS Thrombo Pończochy to przeciwzakrzepowe pończochy o zmiennym ucisku.

Pończochy THROMBO wykonane są z wyjątkowo miękkiego materiału, posiadają wygodny otwór kontrolnym, który znacząco ułatwia pooperacyjną profilaktykę przeciwzakrzepową. Wywierają ucisk o wartości 18 mmHg w okolicy kostki. Powinny być stosowane przez pacjentów leżących jako element profilaktyki przeciwzakrzepowej. Posiadają mankiety samonośny i występują w kolorze białym.

**UWAGA!!** Część produktów posiadamy na stanie, a część produktów zamawiamy bezpośrednio u producenta SIGVARIS w związku z tym niektóre warianty rozmiarowe mogą być pod zamówienie, a czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni. O wydłużonym czasie realizacji klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

### SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: około 18 mmHg w okolicy kostki

Skład: 74% poliamid, 26% elastan

Opakowanie: 1 para

### WSKAZANIA:

- Po operacjach (ortopedycznych, zabiegach w obrębie jamy brzusznej i miednicy)
- Po złamaniach lub urazach w obrębie kończyn dolnych
- U pacjentów z ograniczoną mobilnością

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Dokonaj pomiarów i dobrać odpowiedni rozmiar spośród przedstawionych w tabeli:

#### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Należy najpierw naciągnąć produkt na stopę, umieścić piętę we właściwym miejscu, a następnie, przy pomocy rękawic, rozprowadzić w górę pozostały materiał.

Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz ostre wkładki w obuwiu mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu. Produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z tłustymi maściami, kremami oraz olejkami.

#### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

- Prać codziennie ręcznie lub w pralce w maksymalnej temperaturze 40 stopni Celsjusza z użyciem woreczka do prania (program do prania tkanin delikatnych). Do prania ręcznego polecamy użycie Płynu do Prania Sigvaris (dostępny w dziale Akcesoria).
- Nie używać płynów do zmiękczenia tkanin.
- Nie suszyć w suszarce, ponieważ może to spowodować przegrzanie i generowanie ładunków elektrostatycznych. Wycisnąć w ręczniku, suszyć w przewiewnym miejscu, nie suszyć na słońcu ani na grzejniku.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie. Nie stosować środków chemicznych.

#### PRZECIWWSKAZANIA:

- Zapalenie skóry
- Choroby tętnic
- Nie używać na otwarte rany

## Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
ROZMIAR	XS, S, M, L

## Galeria

