

# SIGVARIS TOP FINE SELECT Podkolanówki uciskowe 1kl

Cena: 159,99 zł



## Opis słownikowy

MANKIET	MANKIET MIĘKKI
Producent	SIGVARIS
TYP	z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym

## Opis produktu

Medyczne podkolanówki SIGVARIS TOP FINE SELECT 1 klasy kompresji (CCL 1) to wysoka jakość w przystępnej cenie.

Każdy produkt tej linii to idealny towarzysz na cały dzień - zarówno w czasie pracy jak i w czasie wolnym. Kryjąca struktura materiału dyskretnie maskuje oznaki schorzeń żylnych, dając Ci pewność siebie w każdej sytuacji. Dzięki kombinacji wysokiej jakości włókien, produkty TOP FINE SELECT są wygodne w użytkowaniu i posiadają atrakcyjny wygląd.

Podkolanówki są matowe i występują w wersji z czubkiem zamkniętym lub otwartym.

**UWAGA!!** Część produktów posiadamy na stanie, a część produktów zamawiamy bezpośrednio u producenta SIGVARIS w związku z tym niektóre warianty rozmiarowe mogą być pod zamówienie, a czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni. O wydłużonym czasie realizacji klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

### SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: I (18-21 mmHg)  
Skład: 68% poliamid, 32% elastan  
Opakowanie: 1 para

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Krótkie – długość 33-37

Długie – długość 38-44

#### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Do zakładania i zdejmowania wyrobów uciskowych najlepiej używać gumowych rękawic SIGVARIS lub innych akcesoriów do tego przeznaczonych. Do produktów z odkrytymi palcami dołączona jest tzw. „śliska stopka”, która ułatwia ich zakładanie. Należy ją nałożyć na stopę, a następnie naciągnąć na nią podkolanówkę, tak żeby pięta znalazła się na swoim miejscu. Następnie, przy pomocy rękawic, rozprowadzić równomiernie w górę pozostały materiał. Na koniec należy wyciągnąć śliską stopkę. Dolny brzeg podkolanówki powinien zaczynać się u nasady palców, a ich miękki mankiet powinien sięgać tuż pod kolano. Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej.

#### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

#### PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

Zaawansowana choroba okluzyjna tętnic obwodowych, bolesny siniczny obrzęk kończyny, septyczne zapalenie żył, zastoinowa niewydolność serca.

## Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	CIELISTY, CZARNY
ROZMIAR	S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS

## Galeria

