

SIGVARIS TOP FINE SELECT Podkolanówki uciskowe 2kl

Cena: 159,99 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------|--|
| MANKIET | MANKIET MIĘKKI |
| Producent | SIGVARIS |
| TYP | z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym |

Opis produktu

Medyczne podkolanówki SIGVARIS TOP FINE SELECT to wysoka jakość w przystępnej cenie.

Każdy produkt tej linii to idealny towarzysz na cały dzień - zarówno w czasie pracy jak i w czasie wolnym. Kryjąca struktura materiału dyskretnie maskuje oznaki schorzeń żylnych, dając Ci pewność siebie w każdej sytuacji. Dzięki kombinacji wysokiej jakości włókien, produkty TOP FINE SELECT są wygodne w użytkowaniu i posiadają atrakcyjny wygląd. Podkolanówki 2 klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Podkolanówki występują w wersji z czubkiem zamkniętym lub otwartym.

SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: II (23-32 mmHg)

Skład: 68% poliamid, 32% elastan

Opakowanie: 1 para

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Krótkie – długość 33-37

Długie – długość 38-44

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od

palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć rajstop czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie podkolanówek medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

Parametry

| | |
|---------|---------------------------------|
| DŁUGOŚĆ | KRÓTKIE, DŁUGIE |
| KOLOR | CIELISTY, CZARNY |
| ROZMIAR | S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS |

Galeria

