


SIGVARIS TRADITIONAL 500 Podkolanówki 3 st. CCL 3

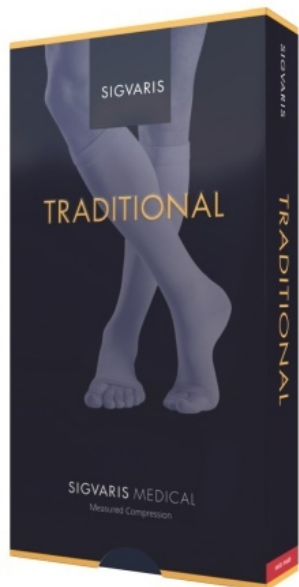

Cena: 209,99 zł

Opis słownikowy

Producent SIGVARIS



Opis produktu

Medyczne **podkolanówki SIGVARIS TRADITIONAL Seria 500** to podkolanówki 3 stopnia kompresji CCL3 o najwyższym standardzie medycznym, zawierają gumę naturalną i zalecane są szczególnie przy długotrwałej terapii uciskowej.

Podkolanówki z linii TRADITIONAL to niezawodny i klasyczny produkt o bardzo wysokiej medycznej skuteczności. Produkty tej linii charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa użytkowania, zapewniając medyczną kompresję najwyższej jakości.

Podkolanówki występują w **kolorze beżowym**, wersji **z czubkiem otwartym**, wykończone są **miękkim mankietem**.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAJĄ:

- Maksymalna stabilność ucisku przez cały dzień
- Doskonały stosunek wytrzymałości i rozciągliwości
- Ogromne medyczne korzyści dla bezpiecznego i skutecznego leczenia

- Wysoki komfort noszenia, dzięki wyjątkowej elastyczności oraz dobrej przepuszczalności powietrza
- Z udoskonalonym naturalnym kauczukiem
- Utrzymywanie odpowiedniego ucisku przez około 6 miesięcy

SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: III (34-46 mmHg)

Skład: 70% poliamid, 30% elastodien (guma naturalna)

Opakowanie: 1 para

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Do zakładania i zdejmowania wyrobów uciskowych najlepiej używać gumowych rękawic SIGVARIS lub innych akcesoriów do tego przeznaczonych. Do produktów TRADITIONAL dołączona jest tzw. „śliska stopka”, która ułatwia ich zakładanie. Należy ją nałożyć na stopę, a następnie naciągnąć na nią podkolanówkę, tak żeby pięta znalazła się na swoim miejscu. Następnie, przy pomocy rękawic, rozprowadzić równomiernie w górę pozostały materiał. Na końcu należy wyciągnąć śliską stopkę. Dolny brzeg podkolanówki powinien zaczynać się u nasady palców, a ich miękki mankiet powinien sięgać tuż pod kolano.

Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz ostre wkładki w obuwiu mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu. Produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z tłustymi maściami, kremami oraz olejkami.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

PRZECIWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

Zaawansowana choroba okluzyjna tętnic obwodowych, bolesny siniczny obrzęk kończyny, septyczne zapalenie żył, zastoinowa niewydolność serca.

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	BEŻOWY
ROZMIAR	S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS, XL, XL PLUS

Galeria



Rodzaje mankietów:

wąski mankiet samonośny guzkowy



miękki mankiet

