

SIGVARIS ULCER X Zestaw do terapii owrzodzeń



Opis produktu

Cena: 189,99 zł

Opis słownikowy

Producent SIGVARIS

SIGVARIS ULCER X zestaw to zestaw podkolanówek stosowanych w leczeniu owrzodzeń żylnych.

KORZYŚCI:

- Komfortowe użytkowanie - przy ich zakładaniu i zdejmowaniu zwykle nie jest potrzebna pomoc osób trzecich
- Wygodne i dyskretne
- Kontrolowany, powtarzalny ucisk
- Rana z opatrunkiem jest zabezpieczona również w nocy dzięki opatentowanej podkolanówce spodniej
- Przy prawidłowym użytkowaniu rana nie jest narażona na obrażenia
- Znak jakości Swiss Made
- Dodatkowe podkolanówki spodnie są dostępne na zamówienie

ZESTAW ZAWIERA:

- 1x podkolanówka TRADITIONAL CCL 2 (23–32 mmHg) (odkryte palce)
- 2x opatentowana podkolanówka spodnia (15-20 mmHg) (zakryte palce)

UWAGA!! Część produktów posiadamy na stanie, a część produktów zamawiamy bezpośrednio u producenta SIGVARIS w związku z tym niektóre warianty rozmiarowe mogą być pod zamówienie, a czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni. O wydłużonym czasie realizacji klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

SZCZEGÓŁY:

Podkolanówka TRADITIONAL (wierzchnia): 70% poliamid, 30% elastodien

Podkolanówka spodnia: 62% poliamid, 26% elastan, 12% bawełna

Klasa kompresji: około 18 mmHg

Opakowanie: 1 para

WSKAZANIA:

- Owrzodzenia żyłne

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Do zakładania i zdejmowania wyrobów uciskowych najlepiej używać gumowych rękawic SIGVARIS lub innych akcesoriów do tego przeznaczonych. Podkolanówkę spodnią zakłada się bezpośrednio na opatrunek, ułatwia ona również założenie podkolanówki Traditional. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz ostre wkładki w obuwiu mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu. Produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z tłustymi maściami, kremami oraz olejkami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Prać codziennie, ręcznie lub w pralce (program do prania delikatnych rzeczy), w temperaturze max 40°C (podkolanówka spodnia: max 60°), w woreczku do prania.

Podkolanówkę wierzchnią (Traditional) należy zakładać rano i zdejmować wieczorem, podkolanówka spodnia może być założona również w nocy, pomaga utrzymać opatrunek na miejscu.

PRZECIWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

Zaawansowana choroba okluzyjna tętnic obwodowych, bolesny siniczny obrzęk kończyny, septyczne zapalenie żył, zastoinowa niewydolność serca.

Parametry

DŁUGOŚĆ	KRÓTKIE, DŁUGIE
KOLOR	BEŻOWY
ROZMIAR	S, S PLUS, M, M PLUS, L, L PLUS, XL, XL PLUS

Galeria

