

## Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday 30 sztuk (-0.50 - -3.50)



Cena od: 58,14 zł

### Opis produktu

#### Soczewki kontaktowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday

- **Rodzaj soczewki:** jednodniowe, HyperGel
- **Zawartość opakowania:** 30 sztuk soczewek jednej mocy
- **Czas noszenia:** do 30 dni
- **Promień krzywizny /BC:** 8,6 mm
- **Średnica /DIA:** 14,2 mm

Jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue ONEday od Bausch+Lomb inspirowane biologią ludzkiego oka, przeznaczone dla osób z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. Szczególnie polecane osobom aktywnym, mającym problem ze zmęczeniem oczu pod koniec dnia noszenia soczewek.

#### Jednodniowe sferyczne soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday mogą być dla Ciebie, jeśli:

- prowadzisz aktywny tryb życia
- uprawiasz sport
- spędzasz dużo czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach
- pracujesz przed komputerem lub w warunkach wykluczających noszenie okularów
- szukasz sposobu korekcji wzroku, który zapewnia komfort nawet przez

16 h

## Materiał HyperGel™, z którego wykonane są soczewki Biotrue® ONEday:

- zapewnia przepuszczalność tlenu odpowiadającą zapotrzebowaniu otwartego oka pomagając zachować oczy w dobrej kondycji
- charakteryzuje się wysoką zawartością wody, taką samą jak w rogówce ludzkiego oka – dzięki temu pozwala zwiększyć komfort użytkowania soczewek
- naśladuje warstwę lipidową filmu łzowego zapobiegając wysychaniu soczewek kontaktowych a tym samym przedłużając komfort ich użytkowania

Dodatkowo soczewka Biotrue® ONEday pomaga chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Optyka Wysokiej Rozdzielczości (High Definition™ Optics) - pozwala na wyraźniejsze widzenie nawet w warunkach słabego oświetlenia. Redukuje nieprzyjemny efekt olśnienia.

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem marki Bausch+Lomb. Wszystkie oferowane przez nas produkty są w 100% oryginalne i pochodzą z polskiej dystrybucji, bezpośrednio od producenta Bausch+Lomb.

## 7 ZASAD JAK POSTĘPOWAĆ Z SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI



UMYJ RĘCE



SPRAWDŹ  
TERMIN WAŻNOŚCI



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ,  
ABY NIE USZKODZIĆ  
SOCZEWKI



NAKLADAJ MAKIJAŻ  
PO ZAŁOŻENIU  
SOCZEWEK



TRZYMAJ SOCZEWKI  
Z DAŁA OD SUBSTANCJI  
CHEMICZNYCH



UPEWNIJ SIĘ  
JAK STOSOWAĆ  
LEKI DO OCZU



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ,  
GDY WYSTĄPI  
PODRAŻNIENIE OCZU  
ZDEJMIJ SOCZEWKI  
I UDAJ SIĘ DO SPECJALISTY

Jeśli używasz soczewek kontaktowych, pamiętaj o stosowaniu się do zaleceń specjalisty oraz zachowaniu bezpieczeństwa i higieny:

- Przed wyjściem z gabinetu specjalisty należy sprawdzić umiejętność sprawnego zdejmowania soczewek lub upewnić się, że można poprosić inną osobę o ich wyjęcie.
- Nigdy nie nosić soczewek przez okres dłuższy niż zalecany przez specjalistę.
- Przed kontaktem z soczewkami umyć i opłukać ręce a następnie wysuszyć. Uważać, aby do oczu lub na soczewki kontaktowe NIE przedostały się kosmetyki, balsamy, mydła, kremy, dezodoranty lub aerozole. Zaleca się zakładanie soczewek przed wykonaniem makijażu.

Kosmetyki na bazie wody rzadziej powodują uszkodzenie soczewek niż produkty na bazie oleju.

- Przed dotknięciem soczewek upewnić się, że na palcach ani dłoniach nie ma ciał obcych, ponieważ mogą one wywoływać mikroskopijne zadrapania na soczewkach, powodując zniekształcenie widzenia i/lub uraz oka.
- Należy zawsze postępować ostrożnie z soczewkami i chronić je przed upuszczeniem.
- NIE dotykać soczewek paznokciami.
- Postępować ściśle według informacji zawartych w instrukcji użytkowania produktu oraz zaleceń lekarza okulisty dotyczących obchodzenia się z soczewkami kontaktowymi, ich zakładania, zdejmowania i noszenia.
- W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ

## O firmie

Bausch + Lomb jest międzynarodowym koncernem pracującym na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Jego głównym celem jest produkcja i dostarczanie pacjentom leków oraz wyrobów medycznych o wysokiej jakości i skuteczności terapeutycznej.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### Warianty produktu



-0.50

58,14 zł

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -0.50  
30 szt



-0.75

58,14 zł

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -0.75  
30 szt



-1.00

58,14 zł

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -1.00  
30 szt



-1.25

58,14 zł

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -1.25  
30 szt



-1.50

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -1.50  
30 szt

58,14 zł



-1.75

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -1.75  
30 szt

58,14 zł



-2.00

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -2.00  
30 szt

58,14 zł



-2.25

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -2.25  
30 szt

58,14 zł



-2.50

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -2.50  
30 szt

58,14 zł



-2.75

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -2.75  
30 szt

58,14 zł



-3.00

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -3.00  
30 szt

58,14 zł



-3.25

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -3.25  
30 szt

58,14 zł



-3.50

Soczewki kontaktowe jednodniowe Bausch&Lomb Biotrue ONEday Moc -3.50  
30 szt

58,14 zł

## Galeria

