

## VEERA FORTE podkolanówki uciskowe II klasa ucisku otwarte długie karmel



Cena od: 66,50 zł

Opis produktu

**Podkolanówki uciskowe VEERA Forte II klasa ucisku** to miękkie, komfortowe podkolanówki kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Produkt jest kryjący, ma właściwości antybakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** II (23-32 mmHg)

**SKŁAD:** 76% poliamid, 24% lycra

**WERSJA:** Palce otwarte

**WYKOŃCZENIE MANKIETU:** Lamówka

**DŁUGOŚĆ:** Długa

**KOLOR:** Karmel

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i

osięga wartości 23 – 32 mmHg.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiary należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## WSKAZANIA:

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchownych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

## PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowa
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar 1 Długie

66,50 zł

Rozmiar 1 Długie



Rozmiar 2 Długie

66,50 zł

Rozmiar 2 Długie



Rozmiar 3 Długie

66,50 zł

Rozmiar 3 Długie



Rozmiar 4 Długie

66,50 zł

Rozmiar 4 Długie



Rozmiar 5 Długie

66,50 zł

Rozmiar 5 Długie

## Galeria

